



## Pukemisoheje: kasvonsuoja visiirillä

Jos on olemassa riski altistua nesteroiskeille, varmista, että valitset roiskekestävän kirurgisen kasvonsuojan visiirillä tai käytät roiskekestävän kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä.

- A. Ennen kuin otat kasvonsuojan käyttöön, taivuta visiirin sivut valmiin taitteen kohdalta taaksepäin. Taitellut sivut suojaavat sivuilta tulevia roiskeita vastaan, jotka muuten voivat roiskua silmiin.
- B. Muotoile nenävahvike.
- C. Vedä kasvonsuojaa ylhäältä ja alhaalta avataksesi sen kokonaan.
- D. Aseta kasvonsuoja kasvoillesi siten, että se peittää sekä nenän että suun.
- E. Aseta ylemmät solmittavat nauhat pään päälle ja solmi ne tiukasti, jotta ilmaa ei pääsisi vuotamaan.

- F. Aseta alemmat solmittavat nauhat niskan taakse ja solmi myös ne tiukasti.
- G. Avaa kasvonsuoja aina kokonaan, jolloin läpi hengitettävien kerrosten määrä vähenee.
- H. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä aina leikkausten välissä.
- I. Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.

Lue lisää [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.  
Mölnlycke ja BARRIER tavaramerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1132005

  
**Mölnlycke®**