

UUSI!

Parannetut käyttöominaisuudet tunnetuille Mepilex® Border Sacrum ja Mepilex® Border Heel sidoksille


Optimoitu **pakara-alueen tiiviys** antaa paremman suojan korkean riskin sakraalialueilla¹

Mepilex®
Border
Sacrum

Optimoitu sidoksen muoto **parantaa suojausta** korkean riskin alueilla¹

Näkyvät käsittelyulokkeet kertovat käyttäjälle mistä pidetään kiinni sidosta uudelleen asetettaessa

SAMA ainutlaatuinen ja suojaava **5-kerrosrakenne**

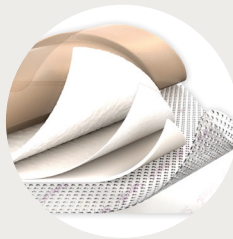

Paremmat, paksummat **sidoksen reunat** mahdollistavat tehokkaan käsittelyn¹

Mepilex®
Border
Heel

Tuote ulottuu **peittämään** mediaali ja lateraali **malleolit**, joka parantaa suojausta¹

Sama upea tuote:

- ✓ Sama 5 -kerrosrakenne
- ✓ Samat materiaalit
- ✓ Sama kiinnitys
- ✓ Sama suojaava sidosrakente
- ✓ Sama painehaavojen ennaltaehkäisyn näyttö



Parannetut käyttäjäominaisuudet:

- ✓ Käsittelyulokkeet
- ✓ Eritteiltä suojaavat siivekkeet pakaravaoissa sacrum -tuotteella
- ✓ Paksummat reunat tehokkaampaan käsittelyyn¹
- ✓ Optimoidut muodot parantavat suojausta korkean riskin alueilla¹

'Mitä käyttäjämme sanovat'

Jopa 28% korkeampi yleisvaikutelma Mepilex Border Sacrum -sidoksen helppokäyttöisyydestä verrattuna muihin saatavilla oleviin sidoksiin¹



Jopa 65% korkeampi yleisvaikutelma Mepilex Border Heel -sidoksen helppokäyttöisyydestä verrattuna muihin saatavilla oleviin sidoksiin¹



Hyödyt

- ✓ Käsittelylokkeet helpompaan ihon tarkkailuun
- ✓ Paksummat reunat parempaan käsittelyyn ja paikallaan pysymiseen
- ✓ Itsekiinnittyvä – ei tarvetta lisäkiinnitykselle
- ✓ Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä²⁻⁴
- ✓ Voidaan käyttää useita päiviä
- ✓ Voidaan asettaa uudelleen menettämättä kiinnitysominaisuuksia


Ennaltaehkäisyyn

Käytettäessä Mepilex® Border Heel ja Mepilex® Border Sacrum sidoksia ennaltaehkäisyyn, on niiden todistettu auttavan suojaamaan ihoa paineen, venytyksen, kitkan ja mikroilmaston aiheuttamilta vaurioilta⁵. Safetac® -kerros suojaa ihoa ylläpitämällä optimaalisen asennon ja vähentämällä kitkaa ja venytystä potilas/sidos välipinnassa². Safetac® -kerros mahdollistaa sidoksen uudelleenasettamisen ihon tarkistuksen jälkeen.

Hoitoon

Käytettäessä Mepilex® Border Heel ja Mepilex® Border Sacrum sidoksia haavojen hoitoon, ne imevät ja pidättävät haavaeritteitä tehokkaasti¹ sekä ylläpitävät kosteaa haavaympäristöä. Safetac® -kerros sulkee haavan reunat, estää haavaeritteen pääsyn ympäröivälle iholle ja näin minimoi maseraation riskiä⁶. Safetac® -kerros mahdollistaa sidoksen vaihdot ilman vauriota haavalle tai ympäröivälle iholle,¹ eikä altista potilasta ylimääräiselle kivulle³.

Kiinnitä huomiota oikeaan sidoksen asettamiseen. Lisätietoa asettamisohjeessa.

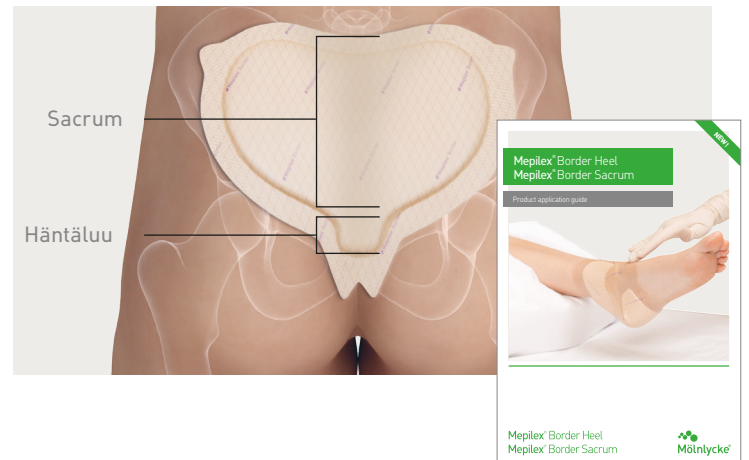

Asettamisohjeet.

Mepilex® Border Sacrum valikoima‡

Tuotenumero	Koko	Kpl / RET	Kpl / TRP
282450	22 x 25 cm	5	30
282050	16 x 20 cm	5	40
282500	15 x 15 cm (vanha muotoilu)	5	50

‡ Steriilisti yksittäispakattu

Mepilex® Border Heel valikoima‡

Tuotenumero	Koko	Kpl / RET	Kpl / TRP
282750	22 x 23 cm	6	30

‡ Steriilisti yksittäispakattu

Viitteet: 1 Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care [GMCS-2017-058] 2017. 2. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 4. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001. 5. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012. 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008

Lisätietoa www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3krs. 00380 Helsinki. Puh +358 (0)201 622 300.
Mölnlycke, Mepilex ja Safetac nimet ja logot ovat yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care Group -konsernin yritykselle globaalisti rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 2017. Mölnlycke Health Care Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC0271707

