



## Pukemisoheje: kasvonsuoja solmittavilla nauhoilla

- A. Muotoile nenävahvike. Aseta kasvonsuoja kasvoillesi siten, että se peittää sekä nenän että suun.
- B. Aseta ylemmät solmittavat nauhat pään päälle ja solmi ne tiukasti, jotta ilmaa ei pääsisi vuotamaan.
- C. Aseta alemmat solmittavat nauhat niskan taakse ja solmi myös ne tiukasti.
- D. Avaa kasvonsuoja aina kokonaan, jolloin läpi hengitettävien kerrosten määrä vähenee.
- E. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä aina leikkausten välissä.
- F. Jos on olemassa riski altistua nesteroiskeille, varmista, että valitset roiskekestävän kirurgisen kasvonsuojan visiirillä tai käytät roiskekestävän kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja.
- G. Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.

Lue lisää [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.  
Mölnlycke ja BARRIER tavaramerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1122005

  
**Mölnlycke®**