

BARRIER® EasyWarm®

Coperta termoattiva autoriscaldante monouso



La coperta BARRIER® EasyWarm® si scalda completamente in 30 minuti e mantiene la temperatura fino a 10 ore.

- Contribuisce a prevenire l'ipotermia nell'intera fase perioperatoria.
- Una volta prelevata dalla confezione, la coperta si scalda subito.
- Utilizzabile senza accessori.

Istruzioni sull'impiego



1. Aprire la confezione dall'intaglio nell'angolo in alto a sinistra. Estrarre la coperta BARRIER® EasyWarm® dalla confezione esterna.



2. Aprire e svolgere completamente la coperta BARRIER EasyWarm facendo attenzione a non posizionarla ripiegata. La coperta si scalda completamente all'aria in 30 minuti e mantiene la temperatura fino a 10 ore.



3. Posizionare la coperta BARRIER EasyWarm con i pad riscaldanti rivolti verso l'alto. Evitare di appoggiare altri pesi sulla coperta.



4. Durante e dopo l'intervento e in caso di interventi a mani/braccia e testa, posizionare la coperta BARRIER EasyWarm su tutto il corpo del paziente.



5. In caso di interventi nell'area addominale inferiore e alle estremità inferiori posizionare la coperta BARRIER EasyWarm sulle estremità superiori e sul torace del paziente. In questo modo lo scollo della coperta si trova all'altezza della testa.



6. In caso di interventi sopra l'area genitale, collocare la coperta BARRIER EasyWarm sulla parte inferiore del corpo del paziente.

Istruzioni per l'uso

- Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico o infermieristico.
- Posizionare la coperta con i pad riscaldanti rivolti verso l'alto. Il lato corretto è indicato dalla scritta «THIS SIDE UP» (LATO VERSO L'ALTO) sulla coperta.
- Non posizionare la coperta ripiegata.
- Evitare di appoggiare altro peso o di esercitare pressione sulla coperta, ad esempio posandovi sopra strumenti medici. Non posare sulla coperta mani, braccia ed estremità del paziente anestetizzato.
- Controllare regolarmente, secondo il protocollo ospedaliero, che non si verifichino eventuali reazioni cutanee.
- Da utilizzare con persone a partire dai 18 anni d'età.

Avvertenze/Controindicazioni

- Non indicata per pazienti con grave compromissione della circolazione periferica (anche della cute).
- Non utilizzare la coperta in ambiente ricco di ossigeno, cioè la coperta non deve essere utilizzata in medicina iperbarica e i pad riscaldanti non devono venire a contatto con il flusso d'aria di terapie a base di ossigeno o di apparecchi.
- I pad riscaldanti sono magnetici e non trasparenti. Rimuovere la coperta prima di esami radiologici o RMI.
- In caso di medicazioni o sistemi transdermici (cerotti) il calore prodotto dalla coperta può aumentare il rilascio del medicamento.

BARRIER® EasyWarm® Coperta termoattiva autoriscaldante

Art. N°	Prodotto	Materiale	Imballaggio	TRP
629900	12 pad riscaldanti che si attivano all'aria (13 cm x 10 cm), integrati in tasche sulla superficie. Dimensioni della coperta: 152 cm x 92 cm.	Multistrato in SMS (polipropilene). I singoli strati e le tasche sono cuciti insieme con filo di poliestere/cotone. I pad riscaldanti sono costituiti da sacchetti traspiranti che contengono carbone attivo, argilla, sale, acqua e polvere di ferro.	Imballaggio sotto vuoto in sacchetto ermetico in polimero. I sacchetti sono avvolti in fogli di pluriball e posti in un cartone di trasporto.	10 pezzi

Per maggiori informazioni consultare il sito www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, GERMANIA Telefono +49 211 920 880
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Vienna, AUSTRIA Telefono +43 1 278 85 42
Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SVIZZERA Telefono +41 44 744 54 00
Mölnlycke, BARRIER e EasyWarm e i corrispondenti nomi e loghi sono marchi registrati a livello internazionale di una o più aziende del gruppo imprenditoriale Mölnlycke Health Care. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. DEIM003050


Mölnlycke®