

Guía de autocuidado para los cambios de apósito

Su enfermera/o (o profesional sanitario) ha elegido el apósito Mepilex® Border Flex para su herida

Cómo aplicar el apósito Mepilex® Border Flex:

1. Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos.
2. Limpie la herida según lo recomendado por su enfermera/o y seque completamente la piel circundante.
3. Asegúrese de colocar el apósito sobre la piel seca rodeando la herida por al menos 1-2 cm.



4. Sostenga el apósito y despegue el papel protector de la parte central.



5. Coloque la parte adherente central del apósito sobre la herida.




6. Retire el papel protector de un lateral del apósito y aplíquelo alisando los bordes sobre la piel.



7. Retire el papel protector del otro lateral del apósito y aplíquelo alisando los bordes sobre la piel




Su apósito tiene un patrón de puntos para ayudar a controlar la cantidad de exudado que ha absorbido.

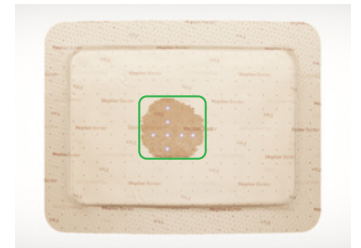

4x4cm. El exudado comenzará a aparecer en la parte posterior del apósito.



8x10cm. El exudado se extenderá por la superficie del apósito cuando quede atrapado lejos de la herida.

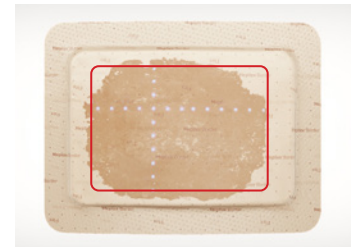

Considere cambiar el apósito cuando el exudado se acerque a los bordes del apósito

Cuándo cambiar su apósito:

El consejo de su enfermera/o es cambiar el apósito:

Cosas a tener en cuenta:

- ✓ La decoloración en la parte posterior del apósito es completamente normal
- ✓ Su apósito puede dejarse puesto hasta 7 días, dependiendo del estado de la herida y la piel perilesional
- ✓ Su apósito se puede usar en la ducha
- ✓ Mepilex Border Flex es de un solo uso y no debe reutilizarse

Para más ayuda y orientación por favor contacte con su enfermera/o:

El apósito Mepilex Border Flex debe ser manejado y aplicado por profesionales de la salud, sin embargo, si un profesional de la salud no está disponible, un miembro de su familia o usted mismo pueden hacer el cambio de apósito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad u obligación relacionada con la aplicación del apósito por parte de dichas personas. En consecuencia, si Mepilex Border Flex es aplicado por una persona que no es un profesional de la salud, es estrictamente bajo el propio riesgo del usuario.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke, Av. de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta, 28108 Alcobendas (Madrid), Tel + 34 914 841 320. Las marcas, nombres y logos de Mölnlycke y Mepilex están registradas globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.