


WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

EINFACH. MACHEN.
Wundversorgung mit Mölnlycke®

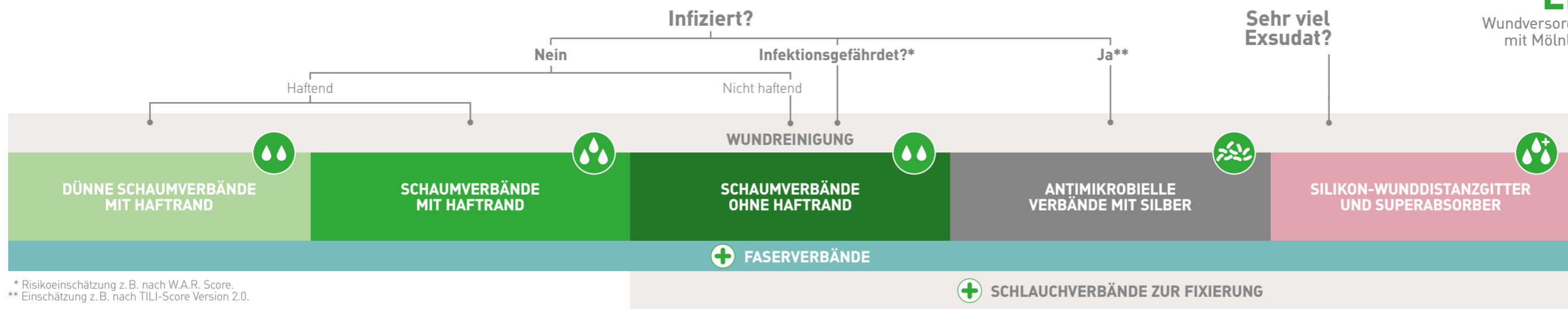

QR-CODE SCANNEN UND MEHR ERFAHREN:

* Risikoeinschätzung z.B. nach W.A.R. Score.
** Einschätzung z.B. nach TILI-Score Version 2.0.

PHASENGERECHTE WUNDVERSORGUNG

	Inflammationsphase / Reinigungsphase		Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelagte Wunden; freiliegende empfindliche Strukturen: z.B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation		Feuchte (oberflächliche) Wunden		Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsstabilisierung
Beispiel						
Exsudation	Nicht bis wenig		Wenig bis mittelstark		Nicht bis wenig	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Aufweichen der Beläge Wundreinigung Feuchthalten 		<ul style="list-style-type: none"> Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus Exsudatmanagement Schutz 		<ul style="list-style-type: none"> Schutz Wundruhe 	<ul style="list-style-type: none"> Schutz Förderung der Elastizität Vorbeugung hypertropher Narbenbildung
Schmerzen minimieren						
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen. Empfehlung: Granudacyn® Wundspüllösung					
Sauerstoff-Therapie	Wunden, deren Reduktion der Wundgröße innerhalb von 4 Wochen weniger als 40 % beträgt: zusätzliche Verabreichung von Granulox®					
Primärverband/ Wundfüller	Granudacyn® Wundgel	Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + Granudacyn® Wundgel	bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Mepilex® Lite + Tubifast®
Alternativ bei infektionsgefährdeter o. infizierter Wunde		Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag oder Mepilex® Border Ag	Exufiber® Ag+			Mepitel® Film Mepiform®
Sekundärverband	Mepilex® Lite	Mepilex® Border Flex Lite	Mepilex® XT	Mextra®	Mepilex® Border Flex oder Mepilex® XT	Mepilex® Border Flex Lite oder Mepitel® Film
Fixierung	Tubifast®					



LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE SITUATIONEN

SEHR STARK EXSUDIERENDE WUNDEN	VERBRENNUNGEN BIS GRAD 2A	CHIRURGISCHE WUNDEN	STRAHLENBEDINGTE HAUTREAKTIONEN	SKIN TEARS
Mepitel® One Mepitel® Mepilex® Transfer Mepitel® Transfer Ag Mextra® Superabsorbent Tubifast®	Mepilex® XT Granudacyn® Wundgel Mepilex® Ag Tubifast®	Mepilex® Border Post-Op Mepitel® Film	Mepilex® Lite Mepitel® Film	Mepitel® One

SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung		
Mepilex® Border Flex					
59 52 50	7,5 x 7,5 cm	7837859	5	eckig	
59 53 50	10 x 10 cm	7837857	5		
59 50 50	12,5 x 12,5 cm	7837858	5		
59 58 00	10 x 20 cm	7846601	10		
59 59 00	10 x 30 cm	7846602	10		
59 54 00	15 x 15 cm	7846600	5		
59 56 00	15 x 20 cm	7238590	5		
58 35 00	7,8 x 10 cm	7752490	5		
58 33 00	13 x 16 cm	7752488	5		oval
58 34 00	15 x 19 cm	7752489	5		

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Border Flex Lite			
58 10 50	4 x 5 cm	7845923	10
58 11 00	5 x 12,5 cm	7845924	5
58 12 50	7,5 x 7,5 cm	7845925	5
58 13 50	10 x 10 cm	7845926	5
58 15 00	15 x 15 cm	7845927	5

SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® XT			
21 10 15	5 x 5 cm	6550380	5
21 11 00	10 x 10 cm	6202785	5
21 12 00	10 x 20 cm	6202791	5
21 13 00	15 x 15 cm	6863245	5
21 14 00	20 x 20 cm	6202822	5
21 15 00	20 x 50 cm	7186083	2

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele:



Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex®			
29 40 15	5 x 5 cm	7805216	5
29 41 50	10 x 12 cm	7805212	5
29 42 50	12 x 20 cm	7805213	5
29 43 50	15 x 17 cm	7805214	5
29 44 50	20 x 22 cm	7805215	5

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Lite			
28 40 00	6 x 8,5 cm	2754714	5
28 41 00	10 x 10 cm	2754720	5
28 43 00	15 x 15 cm	7821327	5
28 45 00	20 x 50 cm	5548122	4

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Transfer			
29 47 00	10 x 12 cm	3516827	5
29 48 00	15 x 20 cm	2619301	5
29 45 02	20 x 50 cm	5539778	4

FOLIENVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepitel® Film			
29 61 70	6 x 7 cm	7779030	10
29 62 70	10 x 12 cm	7779031	10
29 64 70	10 x 25 cm	7779032	10
29 66 70	15 x 20 cm	7779033	10

ANTIMIKROBIELLE SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Ag			
28 70 21	6 x 8,5 cm	3686564	10
28 71 10	10 x 10 cm	3516750	5
28 72 10	10 x 20 cm	3516767	5
28 73 10	15 x 15 cm	6863251	5
28 74 10	20 x 20 cm	3516796	2
28 75 10	20 x 50 cm	3984066	2

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Border Ag			
39 52 00	7 x 7,5 cm	4677277	5
39 53 00	10 x 10 cm	4677283	5
39 54 00	15 x 15 cm	4677231	5

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Transfer Ag			
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	5602382	10
39 41 00	10 x 12,5 cm	5602399	5
39 48 00	15 x 20 cm	5602413	10
39 45 00	20 x 50 cm	5602407	2

CHIRURGISCHE WUNDVERSORGUNG

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Border Post-Op			
49 61 00	6 x 8 cm	7751715	10
49 62 00	9 x 10 cm	7751910	10
49 63 00	10 x 15 cm	7751714	10
49 64 00	10 x 20 cm	7751906	10
49 64 50	10 x 25 cm	7751907	10
49 66 00	10 x 30 cm	7801827	10
49 66 50	10 x 35 cm	7801828	5

SILIKON-WUNDDISTANZGITTER

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepitel®			
29 05 00	5 x 7 cm	6855837	5
29 07 00	8 x 10 cm	6863280	5
29 10 00	12 x 15 cm	3628294	5
29 20 30	20 x 32 cm	3628302	5

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepitel® One			
Mit Abziehhilfe (Skin Tears)			
28 91 70	6 x 7 cm	7783219	5
28 92 70	9 x 10 cm	7783220	5
28 94 70	13 x 15 cm	7783221	5
Ohne Abziehhilfe			
28 90 00	5 x 7 cm	4379485	5
28 92 00	8 x 10 cm	4379491	5
28 94 00	12 x 15 cm	4379516	5
28 97 00	17 x 25 cm	7798164	5

FIXIERUNG

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmasse	Pharma-code	Stück/ Packung
Tubifast®				
10 m Länge, auf Rolle – unsteril				
24 34	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	3516715	1
24 36	Grün (5 cm)	14–24 cm	3516721	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	3516738	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	3516690	1
24 44	Violett (20 cm)	64–130 cm	7084193	1

GELBILDENDER FASERVERBAND

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Exufiber®			
70 99 00	5 x 5 cm	7689097	10
70 99 01	10 x 10 cm	7689105	10
70 99 03	15 x 15 cm	7689111	10
70 99 06	4,5 x 20 cm	7741863	10
Tamponade			
70 99 08	1 x 45 cm	1030106	5
70 99 09	2 x 45 cm	7689128	5

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Exufiber® Ag+			
60 34 01	5 x 5 cm	7844757	10
60 34 02	10 x 10 cm	7844758	10
60 34 03	15 x 15 cm	7844759	10
60 34 05	4,5 x 20 cm	1043708	10
Tamponade			
60 34 00	2 x 45 cm	7844756	5

NARBENBEHANDLUNG

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepiform®			
29 36 00	4 x 30 cm	3780079	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	6982151	5
29 38 00	10 x 18 cm	7050685	5

SUPERABSORBER

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mextra® Superabsorbent			
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	6994585	10
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	6994579	10
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	6994591	10
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	6994616	10
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	6994622	10
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	6994639	10
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	6994645	10

ALGINATE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Melgisorb® Plus*			
25 20 00	5 x 5 cm	5638635	10
25 22 00	10 x 10 cm	5638641	10
25 25 00	10 x 20 cm	5638658	10
Tamponade			
25 35 00	3 x 45 cm	5638664	5

SAUERSTOFF-THERAPIE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Karton
Granulox® Hämoglobin-Spray*			
36 00 01	12ml/ca.30 Anwendungen	7801640	6

WUNDREINIGUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grösse	Pharma-Code	Stück/ Karton
Granudacyn® Wundspüllösung und Gel*				
36 01 50	Wundspüllösung 50ml	50 ml	7771948	20
36 01 00	Wundspüllösung 250ml	250 ml	7766459	15
36 01 01	Wundspüllösung 500ml	500 ml	7766460	12
36 01 02	Wundspüllösung 1000ml	1000 ml	7766461	6
36 01 03	Wundspüllösung NPWT 500ml	500 ml	7766462	12
36 01 04	Wundspüllösung NPWT 1000ml	1000 ml	7766457	6
36 01 07	Wundgel 50 g	50 g	7766464	12
36 01 08	Wundgel 100 g	100 g	7766463	12
36 01 06	Wundgel 250 g	250 g	7766458	15

WUNDVERSORGUNG



Sofern nicht aufgeführt, sind alle Produkte steril – einzeln verpackt.

Kontaktieren Sie uns unter +41 44 744 54 00 oder info.ch@molnlycke.com für die aktuelle MiGeL Übersichtsliste.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Molnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz.
Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com.
Der Name Molnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2023 Molnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
CH-DWC0090

Stand: November 2023

