


# Tubifast® 2-Way Stretch®

Hochwertiger Schlauchverband für volle Bewegungsfreiheit der Patienten




Tubifast® 2-Way Stretch® Schlauchverbände sind für die Fixierung von Verbänden ohne Sicherheitsnadeln oder Klebebänder, als Patch Wrap (feucht oder trocken) und als Unterziehstrumpf konzipiert. Tubifast kann auch zur Hautabdeckung für beliebige Körperpartien und bei der Behandlung von Epidermolysis Bullosa<sup>2</sup> eingesetzt werden.


## Anwendung von Tubifast® 2-Way Stretch®

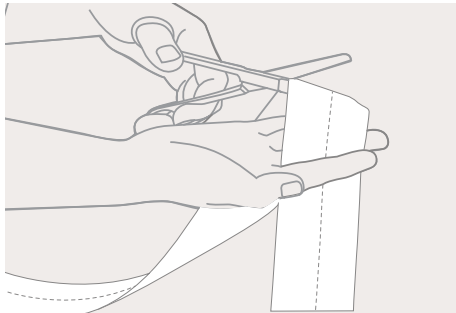

1. Wählen Sie mithilfe der Schnellreferenz-Farbcodierung eine Bandage in der korrekten Breite aus und schneiden Sie diese zu.

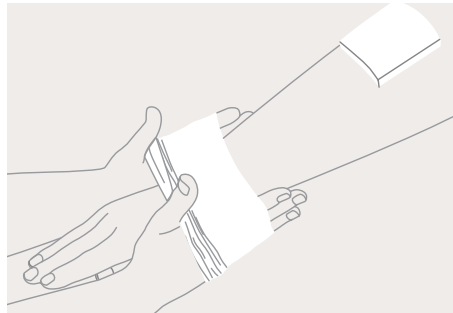

2. Dehnen Sie Tubifast 2-Way Stretch über dem betroffenen Bereich.

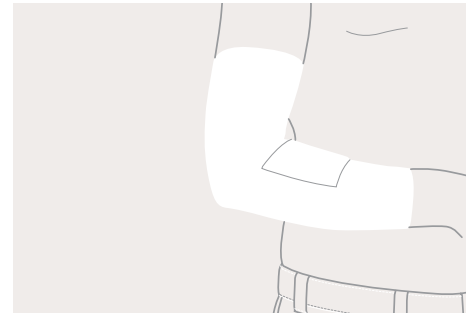

3. Platzieren Sie Tubifast 2-Way Stretch so, dass es den Verband bedeckt.

## So funktioniert Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast 2-Way Stretch hat eine selbsthaltende, schlauchförmige Struktur, die eine Luftzirkulation über der Haut ermöglicht. Tubifast 2-Way Stretch bietet Elastizität sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung, was den Patienten völlige Bewegungsfreiheit gibt.

### Vorteile

- Passt sich dank der 2-Way-Stretch Technologie an Gliedmassen oder dem Körper in jeder Form an
- Ermöglicht vollständige Bewegungsfreiheit
- Einfache Handhabung: Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Selbsthaltend ohne Sicherheitsnadeln oder Klebebänder
- Latexfrei, nicht sensibilisierend und nicht reizend
- Nach dem Waschen wiederverwendbar
- Erhältlich in 5 farbcodierten Breiten, passend für jede Körperpartie

### Anwendungsbereiche

- Fixierung von Wundverbänden
- Patch Wrap
- Unterziehstrumpf
- Hautabdeckung bei EB (Epidermolysis Bullosa)<sup>2</sup>

### Enthaltene Fasern

Viskose, Elastan und Polyamid

## Bestellinformationen für Tubifast 2-Way Stretch

Produkt	Breite x Länge	Glied-masse	Art.-Nr.	Stück/RET	Stück/TRP
<b>ROT</b> Kleine Gliedmassen	3,5 cm x 10 m	9-18 cm	2434	1	20
<b>GRÜN</b> Kleine und mittelgrosse Gliedmassen	5 cm x 10 m	14-24 cm	2436	1	24
<b>BLAU</b> Grosse Gliedmassen	7,5 cm x 10 m	24-40 cm	2438	1	30
<b>GELB</b> Sehr grosse Gliedmassen, Kopf, Rumpf (Kinder)	10,75 cm x 10 m	35-64 cm	2440	1	12
<b>VIOLETT</b> Rumpf (Erwachsene)	20 cm x 10 m	64 - 130 cm	2444	1	15

Tubifast 2-Way Stretch ist in Einzelpackungen verpackt.

### Waschanleitung



Literatur: 1. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a two-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatrisations 2013;18(88):38-44.  
2. Mölnlycke Health Care. Interne Daten.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.ch](http://www.molnlycke.ch)

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com)  
Die Marken, Namen und Logos von Mölnlycke Tubifast und TwoWay Stretch sind global eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. HQIM002144