

# ● Mepore® Film

## Prodyšné, průhledné, samolepící filmové krytí

Mepore Film je průhledné samolepící filmové krytí. Ideálně se hodí k sekundární fixaci a lze ho rovněž použít jako primární krytí k ošetření široké řady čistých ran. Systém aplikace krytí Mepore Film byl vyvinut tak, aby umožňoval snadné použití.

Papírový rámeček s krycí fólií pro snadnější aplikaci krytí

Elastický polyuretanový film je průhledný a prodyšný, zvyšuje pohodlnost při nošení a vytváří ideální podmínky pro hojení rány.

Filmová vrstva je odolná proti virům a bakteriím, nepropouští tekutiny, a zajišťuje tak bezpečnost a ochranu

Polyakrylátové lepidlo je šetrné ke kůži a zajišťuje jemnou, avšak pevnou fixaci



### Jak krytí Mepore Film funguje

Mepore Film se snadno přizpůsobí nerovnému povrchu a tvaru těla. Slouží jako bariéra proti prosáknutí tekutiny a proti vniknutí virů a bakterií do rány.

Mepore Film udržuje ránu ve vlhkém prostředí. Velmi dobře propouští vodní páry, a z rány a jejího okolí tak může unikat přebytečná vlhkost.

### Oblasti použití

Mepore Film lze používat jako přizpůsobivé fixační krytí aplikované přes primární krytí, jako jsou např. hydrogely, algináty a pěnová krytí. Krytí Mepore Film je rovněž určeno k ošetření široké řady čistých ran v granulační fázi, jako např.:

- Povrchové popáleniny
- I.V. vstupy
- Odřeniny
- Lacerace
- Odběrové plochy
- Povrchové dekubity
- Uzavřené chirurgické rány


### Jak Mepore Film použít



Upozornění pro rozměry 10x25 cm a 15x20 cm: Sejměte oříznutý papírek ve středu krytí a vyhodte ho.



Sejměte ochrannou fólii (s potiskem Mepore), a odkryjte tak lepicí plochu.

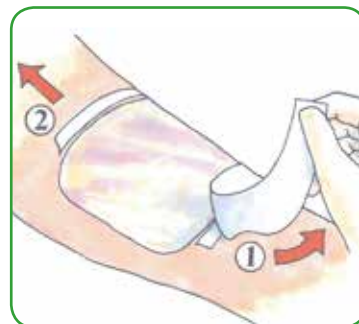

Umístěte krytí na kůži a pevně ho uhladte. Odtrhněte papírový rámeček. Sejměte dva bílé štítky po stranách. Krytí při aplikaci nenatahujte!

### Výhody krytí Mepore Film

- Má vysokou prodyšnost
- Umožňuje snadnou aplikaci, a to i v případě použití rukavic
- Omezuje riziko poškození nově vytvořené tkáně
- Snadno se přizpůsobí tvaru těla
- Obsahuje lepidlo šetrné ke kůži

- Zajišťuje bezpečnou fixaci
- Udržuje ránu ve vlhkém prostředí
- Je odolné vůči virům a bakteriím a tvoří bariéru proti prosáknutí
- Nepropouští tekutiny

### Upozornění

Krytí Mepore Film by se nemělo používat na rány zasahující kůži v plné tloušťce včetně poranění svalů, šlach, kostí nebo popálenin třetího stupně. Krytí Mepore Film by neměli používat pacienti citliví na akrylové lepidlo.



### Přehled velikostí Mepore Film

| Kód VZP | Číslo výrobku | Velikost cm | Ks v balení | Ks v kartonu |
|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 80512   | 270600        | 6x7         | 100         | 600          |
| 80513   | 271500        | 10x12       | 70          | 210          |
|         | 272500        | 10x25       | 20          | 100          |
|         | 273000        | 15x21,5     | 10          | 50           |
|         | 273500        | 20x30       | 5           | 30           |

Sterilní, jednotlivě balený