


# Mepore<sup>®</sup> Pro

## Voděodolné samolepící absorpční krytí

Mepore Pro je samolepící, absorpční a prodyšné krytí s vnější vrstvou filmu, který ránu chrání před vnějšími tekutinami a nečistotami. Krytí obsahuje lepidlo na vodní bázi bez rozpouštědel, které je šetrné ke kůži a zajišťuje jemnou, avšak pevnou fixaci.



Snadno snímatelný ochranný papír pro snadné použití

Absorpční poduška s nepřilnavou kontaktní vrstvou zvyšuje pacientovo pohodlí a prodlužuje možnou dobu nošení krytí

Lepidlo na vodní bázi bez rozpouštědel je šetrné ke kůži a zajišťuje jemnou, avšak pevnou fixaci

Měkká elastická netkaná textilie zvyšuje pohodlí pacienta

Svrchní film odolný proti virům a bakteriím chrání ránu před vnějšími nečistotami

Prodyšný voděodolný film přispívá k pohodlí pacienta a umožňuje delší dobu nošení

### Jak krytí Mepore Pro funguje

Svrchní film chrání ránu před vodou a nečistotami, a proto se krytí nemusí snímat během sprchování. Film rovněž chrání oděv a ložní prádlo před prosakující krví či exsudátem. Díky vysoce absorpční podušce a vysoké prodyšnosti svrchního filmu má krytí dobrou schopnost zvládat tekutiny.

Speciálně vyvinuté polyakrylátové lepidlo je šetrné ke kůži,

ale zároveň bezpečně drží. Snadno snímatelné ochranné papírky umožňují sterilní aplikaci a zároveň zjednodušují aplikaci krytí. Snadnou aplikaci podporuje i stabilita vrstveného materiálu z látky a filmu.

### Oblasti použití

Krytí Mepore Pro lze používat k ošetření celé řady slabě až středně exsudujících ran. Patří mezi ně např. chirurgické rány, povrchové popáleniny, řezné rány a odřenyiny.

### Jak Mepore Pro použít



Otevřete obal a vyjměte z něj krytí.



Uchopte oba vzájemně se překrývající ochranné papírky a odkryjte lepicí povrch. Takto dosáhnete počátečního přilnutí krytí.



Umístěte krytí na kůži bez jeho natahování. Opatrně sejměte zbývající ochranné papírky. Uhladte lepicí okraj, aby krytí náležitě přilnulo. Při aplikaci krytí nenapínejte.

### Frekvence převazů

Frekvence převazů se řídí stavem ošetřované rány. Při snímání krytí uchopte okraj krytí a pomalu ho odlepujte od kůže ve směru růstu chloupků.

### Výhody krytí Mepore Pro

- Lze se s ním sprchovat
- Nepřílnavá kontaktní vrstva minimalizuje riziko přilepení krytí do rány
- Chrání ránu před vnějšími tekutinami a nečistotami
- Svrchní film je odolný vůči virům a bakteriím
- Vylepšená absorpční kapacita
- Snadno snímatelné ochranné papírky umožňují pohodlnou a aseptickou aplikaci
- Prodyšný film

- Nízké tření o oblečení a ložní prádlo
- Lepidlo na vodní bázi je šetrné ke kůži
- Kulaté rohy umožňují pevnou fixaci (ve všech rozměrech až do 9x15 cm)

### Upozornění

Dbejte na to, aby se krytí Mepore Pro při aplikaci nenapínalo – vlivem tažných sil by mohlo dojít k poškození kůže. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat při aplikaci krytí přes klouby.



### Přehled velikostí Mepore Pro

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
80721	670820	6x7	60	480
80722	670920	9x10	40	320
80723	671020	9x15	40	320
	671120	9x20	30	180
	671220	9x25	30	180
	671320	9x30	30	270

Sterilní, jednotlivě balené