



## Samolepící absorpční krytí

Krytí Mepore je prodyšné, má samolepící schopnost a ideálně se hodí k ošetření slabě až středně exsudujících ran. Šetrné polyakrylátové lepidlo na vodní bázi a bez rozpouštědel zajišťuje jemnou, avšak pevnou fixaci.



## Jak krytí Mepore funguje

Díky porézní struktuře netkané textilie může kůže pod krytím dýchat a pot se může odpařovat. Materiál se dobře přizpůsobí tvaru těla a nebrání případnému pohybu. Textilie nemá schopnost absorpce a působí jako bariéra bránící prosáknutí krve a tekutin. Speciálně vyvinuté polyakrylátové lepidlo je šetrné ke kůži, ale zároveň bezpečně drží. Poduška má schopnost absorbovat přiměřené množství tekutin a je vybavena nepřilnavou vrstvou, která snižuje riziko přilepení se do rány.

## Jak Mepore použít



Otevřete obal a vyjměte z něj krytí.



Uchopte oba vzájemně se překrývající ochranné papírky a odkryjte lepicí povrch. Takto dosáhnete počátečního přilnutí krytí.



Umístěte krytí na kůži bez jeho natahování. Opatrně sejměte zbývající ochranné papírky. Uhladte lepicí okraj, aby krytí náležitě přilnulo. Při aplikaci krytí nenapínejte.

## Frekvence převazů

Frekvence převazů se řídí stavem ošetřované rány. Při snímání krytí uchopte okraj krytí a pomalu ho odlepujte od kůže ve směru růstu chloupků.

## Výhody krytí Mepore

- Lepidlo na vodní bázi je šetrné ke kůži
- Nepřilnavá kontaktní vrstva minimalizuje riziko přilepení se krytí do rány
- Pružný svrchní film odpuzuje vodu
- Snadno snímatelné ochranné papírky umožňují pohodlnou a aseptickou aplikaci
- Prodyšný film zabraňuje maceraci a zvyšuje pohodlí pacienta
- Kulaté rohy umožňují pevnou fixaci (ve všech rozměrech až do 9x15 cm)

## Upozornění

Snadno snímatelný ochranný papír umožňuje sterilní aplikaci krytí a rovněž celý proces aplikace zjednodušuje.

## Oblasti použití

Krytí Mepore lze používat k ošetření celé řady slabě až středně exsudujících ran. Mezi ně patří například chirurgické rány, povrchové popáleniny, řezné rány a odřenyiny.

Dbejte na to, aby se krytí Mepore při aplikaci nenapínilo – vlivem tažných sil by mohlo dojít k poškození kůže.

Zvláštní opatrnost je třeba věnovat při aplikaci krytí přes klouby



## Přehled velikostí Mepore

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
80186	670800	6x7	60	480
80187	670900	9x10	50	400
80188	671000	9x15	50	400
	671100	9x20	30	180
	671200	9x25	30	180
	671300	9x30	30	270
	671400	9x35	30	180

**Sterilní, jednotlivě balené**