

Mepore® Film Roll

Nesterilní, prodyšné, transparentní, samolepící filmové krytí

Mepore Film Roll je nesterilní, transparentní samolepící filmové krytí, které je určeno pro fixaci krytí, hadiček a kanyl. Krytí Mepore Film Roll je také určeno k prevenci poškozené kůže a jako ochrana křehké kůže před tekutinami i před kontaminací viry a bakteriemi.

Předměřený ochranný papír usnadní stanovení přesné velikosti a umožňuje jednoduché stříhání.

Lepidlo šetrné ke kůži zajišťuje bezpečnou fixaci a pohodlí pacienta.



Plastová role dodává výrobku ochranu při jeho skladování a umožňuje jednoduchou manipulaci s filmem.

Odolný vůči virům a bakteriím. Nepropustný při sprchování.

Vysoce transparentní film, který je prodyšný pro vodní páry, a tím minimalizuje riziko macerace.

Jak Mepore Film Roll funguje

Mepore Film Roll je přizpůsobivé, transparentní krytí, které je určeno k ochraně křehké kůže, zatímco se snadno přizpůsobí nerovnému povrchu a tvaru těla. Zajišťuje bariéru před průnikem tekutiny a kontaminací viry a bakteriemi.

Mepore Film Roll poskytuje jednoduchou a bezpečnou fixaci krytí, hadiček a kanyl.

Mepore Film Roll zajišťuje vlhké prostředí. Mepore Film Roll umožňuje, aby nadbytečná vodní pára prostoupila z kůže skrze krytí.

Oblasti použití

Mepore Film Roll může být použit pro fixaci krytí, hadiček a kanyl.

Mepore Film Roll je také určen k prevenci poškozené kůže a jako ochrana křehké kůže před tekutinami i před kontaminací viry a bakteriemi. Je přirozenou volbou pro fixaci nebo i jako samotné krytí.

Použití krytí Mepore Film Roll



Odstraňte část ochranného papíru označený č. "1".



Je vhodnější aplikovat Mepore Film Roll s ještě zcela neodstraněným ochranným papírem. Zkontrolujte, zda je film pevně vyhlazen na kůži.



Odstraňte podpůrný film oddělením části, která je označena č. "2".



Sejměte bílé papírové štítky po stranách.

Výhody krytí Mepore Film Roll

- Transparentní film je vysoce prodyšný pro vodní páry, a tím zabraňuje vzniku macerace
- Obsahuje lepidlo šetrné ke kůži a zajišťuje bezpečnou fixaci a pohodlí pacienta
- Transparentní film umožňuje pravidelnou kontrolu rány a detekci jakékoliv komplikace v ráně
- Je odolné vůči virům a bakteriím a vylučuje riziko vnější kontaminace
- Krytí je nepropustné při sprchování
- Tenký a flexibilní film se snadno přizpůsobí tvaru těla. Optimalizuje spotřebu a zvyšuje pohodlí pacienta
- Předměřené ochranné papíry usnadní stanovení přesné velikosti a umožňují jednoduché stříhání
- Film je dodáván na praktické plastové roli, která tak výrobku dodává ochranu při jeho skladování a umožňuje jednoduchou manipulaci

Upozornění

Krytí Mepore Film Roll by neměli používat pacienti citliví na akrylové lepidlo.



Mepore Film Roll je dostupný v nesterilním provedení v délce 10 m na plastové roli, která tak výrobku dodává ochranu při jeho skladování.

Číslo výrobku	Šířka v cm	Ks v balení	Ks v kartonu
276105	5	1	24
276110	10	1	12
276115	15	1	8

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
Tel. +420 221 890 517
Fax +420 224 817 582
www.molnlycke.com

