


# ● Mextra® Superabsorbent


## Superabsorpčné krytie s podkladom odpudzujúcim tekutinu

Unikátne 4 vrstvy krytia Mextra® Superabsorbent sú zostavené presne tak, aby poskytovali optimálne zvládnutie exsudátu. Kľúčovou výhodou pre vás a vašich pacientov je práve schopnosť zvládať exsudát, ktorá podporuje úspešné hojenie.

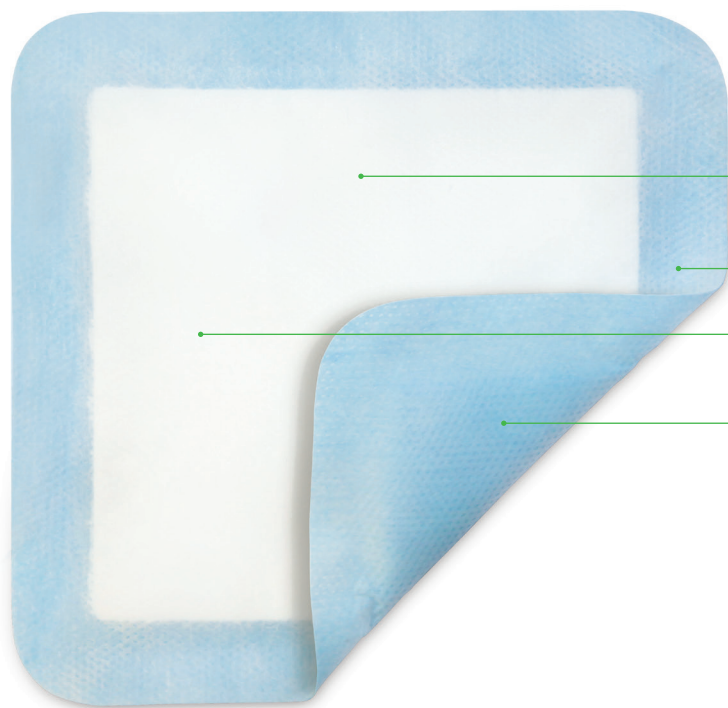


- Vrstva, ktorá odvádza exsudát rovnomerne do absorpčného jadra
- Hydrofilná kontaktná vrstva
- Absorpčnú vrstvu tvorí optimálne množstvo vlákien a superabsorpčných častíc
- Podklad odpudzujúci tekutinu


## Ako použiť Mextra® Superabsorbent:

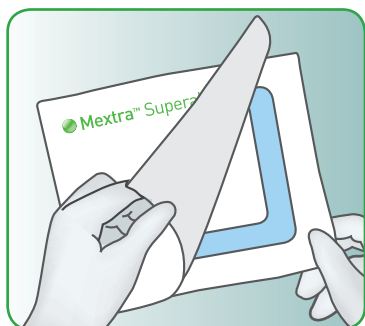

1. Očistite ranu a vyberte krytie Mextra® Superabsorbent zodpovedajúcej veľkosti.

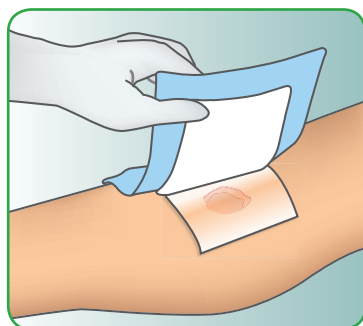

2. Priložte krytie Mextra® Superabsorbent bielou stranou krytia priamo na ranu. Kvôli lepšiemu výsledku by mal okraj absorpčného vankúšika presahovať minimálne 2 cm cez okraje rany. Mextra® Superabsorbent je možné používať aj v spojení so silikónovým krytím Mepitel, alebo Mepitel One.

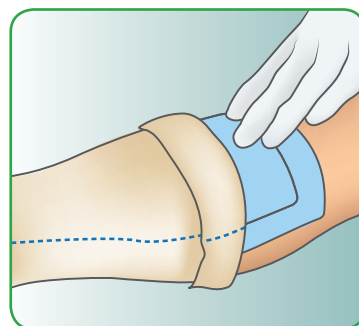

3. Zaisťte krytie Mextra® Superabsorbent vhodnou fixáciou, napríklad hadicovým obvazom Tubifast. V prípade potreby môže byť krytie použité aj pod kompresnou bandážou.

## Mextra® Superabsorbent

- Skvelé absorpčné a retenčné vlastnosti
- Minimalizácia rizika macerácie a presakovania exsudátu
- Zachováva celistvosť a po absorbovaní exsudátu sa nezväčšuje
- Chráni pred únikom exsudátu
- Horná vrstva zostáva suchá
- Komfortné pre pacientov
- Použiteľné pod kompresné bandáže

## Frekvencia výmeny

Krytie Mextra® Superabsorbent môže byť ponechané na mieste niekoľko dní. Meniť by sa malo podľa klinického stavu rany, alebo keď sa naplní jeho kapacita.

## Oblasť použitia

Krytie Mextra® Superabsorbent je určené na použitie pri stredne a silne exsudujúcich ranách. Prostredníctvom kontaktnej vrstvy absorbuje exsudát, zadržiava ho vo vnútri, v jadre vo forme gélu a minimalizuje tak riziko macerácie. Vrstva z netkanej textílie odpudzujúca tekutinu pôsobí ako bariéra a zabraňuje presakovaniu exsudátu.



Prehľad veľkostí Mextra® Superabsorbent

Kód ŠÚKL	Číslo výrobku	Artikel	Veľkosť v cm	Ks v kartóne
A89559	610000	Mextra® Superabsorbent	10x10	10/50
A89560	610100	Mextra® Superabsorbent	10x15	10/40
A89561	610200	Mextra® Superabsorbent	10x20	10/90
A89562	610300	Mextra® Superabsorbent	15x20	10/40
A89563	610400	Mextra® Superabsorbent	20x25	10/40
A89564	610500	Mextra® Superabsorbent	20x30	10/50