


Tubifast™ Garments

WITH
2-WAY STRETCH™
TECHNOLOGY

Tubifast Garments s 2-Way Stretch technologií je řada oblečení určených pro mokré a suché zábaly a také pro fixaci krytí.

SoftSeam Technology™ pomáhá zmírnit dráždění citlivé pokožky

Pohodlné, rychlé a jednoduché řešení pro suché nebo mokré zábaly¹

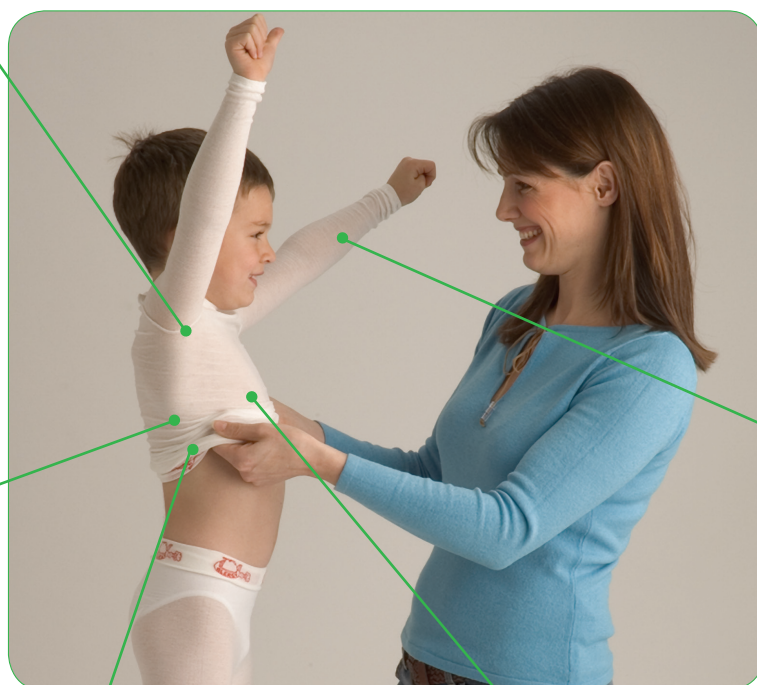

Podporují plnou aktivitu přes den a klid v noci (ve spojení se zvláčňující terapií)¹

Pohodlné nošení pod nočním úborem i běžným oblečením

Dokonale volný pohyb díky elastickému provedení

Jak oděvy Tubifast Garments fungují

Oděvy Tubifast Garments s 2-Way Stretch technologií na fixaci krytí a mokré a suché zábaly jsou k dispozici v těchto provedeních: triko s dlouhým rukávem, legíny a ponožky. Velikosti jsou určeny pro děti od šesti měsíců.

Oděvy Tubifast s 2-Way Stretch technologií jsou rychle a snadno použitelné bez použití pásek, špendlíků či poutek a jejich dvoucestná strečová konstrukce zajišťuje kompletní svobodu pohybu. Pohodlně se nosí pod nočním úborem i běžným oděvem. Pomáhají plnohodnotně prožívat všechny denní aktivity a přispívají také k zajištění klidných nocí.

Výhody Tubifast oděvů s 2-Way Stretch technologií

- Ploché švy, které pomáhají předcházet podráždění citlivé pleti
- Praktický, rychlý a jednoduchý způsob zábalů
- Pohodlné pro nošení pod běžné oblečení
- Zajistí úplnou svobodu pohybu
- K dispozici trička s dlouhými rukávy, legíny a ponožky
- Vylepšená fixace krku u triček

Složení

- Viskóza
- Polyamide
- Elastan

Pokyny pro praní



DŮLEŽITÉ INFORMACE: Velikosti Tubifast oděvů jsou navrženy podle věku dítěte. Máte-li jakékoli pochybnosti o výběru velikosti, měli byste vždy zvolit větší velikost, např. v případě, že dítě nosí pleny.

Reference:

1. Page B (2005) The Benefits of Tubifast Garments in the management of atopic eczema. *British Journal of Nursing* 14 (5); 289-92.
2. Cork MJ, Complete Emollient Therapy. *The National Association of Fundholding Practices Official Yearbook*. BPC Waterlow, Dunstable 1998: 159-168

Tubifast oděvy ani jejich obal neobsahují přírodní gumový latex.

Možnosti použití

Mokrý zábal je terapie používaná v léčbě atopické dermatitidy a představuje použití emoliencií (změkčovadel) a fixačních obvazů. Toto lze provádět pomocí kombinace zvláčňujícího přípravku Epaderm™ s Tubifast oděvy s 2-Way Stretch technologií. Emoliencium se nanáší na postiženou kůži, která je pak překryta vrstvou vlhkého Tubifast oděvu nebo obvazu. Takto dohromady pak změkčovadlo a vlhká vrstva udržují pokožku hydratovanou a snižují zánět a podráždění.¹

Vlhký Tubifast oděv s 2-Way Stretch technologií nebo obvaz působí také jako bariéra zajišťující kontakt emolienca s pokožkou. Vlhká vrstva rovněž chladí, zklidňuje pokožku a pomáhá snižovat svědění². Poté se přiloží druhá, suchá vrstva oblečení, která zajistí, že pacientův oděv zůstane suchý a zabrání, aby se dalším škrábáním nezhoršoval stav kůže a nedošlo k možnému zranění.

Suchý zábal je velmi podobný mokrému. Emoliencium se nanáší na postiženou kůži, která je pak překryta jednou suchou vrstvou Tubifast oděvu s 2-Way Stretch technologií nebo obvazem.

Přehled sortimentu

Číslo výrobku	Typ	Kód VZP	Velikost	Počet kusů v balení/kartonu
992007	tričko		6 - 24 měs	1/6
992008	tričko		2 - 5 let	1/6
992009	tričko		5 - 8 let	1/6
992010	tričko		8 - 11 let	1/6
992011	tričko		11 - 14 let	1/6
992012	legíny		6 - 24 měs	1/6
992013	legíny		2 - 5 let	1/6
992014	legíny		5 - 8 let	1/6
992015	legíny		8 - 11 let	1/6
992016	legíny		11 - 14 let	1/6
992017	ponožky		uni	1/6