



## BARRIER®

### Hybrid kardiovaskulært sæt

- **Alt-i-en løsning** gør det muligt at drapere afdækningen for én person og sparer tid sammenlignet med brug af flere afdækninger
- **Stor** 4,5 m lang og 2,4 m bred afdækning, der dækker store operationsborde helt
- **Incisionsfilm** til både minimalt invasive indgreb og åben kirurgi samt til femoral, perkutan adgang
- **Forstærket område** langs patientens fulde længde giver absorption og ekstra styrke
- **Transparente plastfilm sider**, muliggør steril adgang til kontrolpaneler og visuel styring af C-buen
- **Sideposer** til slanger, instrumenter og væske.

## Draperingsvejledning



1. Fiksér afdækninger med klæb så de definerer operationsfeltet lateralt.



2. Fjern beskyttelsespapiret og fiksér afdækningen midt på brystet.



3. Incisionsfilmens øverste kant skal anbringes svarende til midt jugulum eller højere. Tryk for at fastgøre filmen.




4. Fold siderne ud.




5. Fjern beskyttelsespapiret. Afdækningen skal fortsat være centreret over patienten.



6. Fold afdækningen ud over lysken.

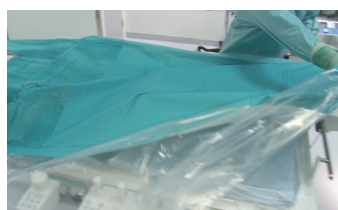

7. Fold afdækningen helt ud mod fødderne. Tryk for at fastgøre incisionsfilmen.

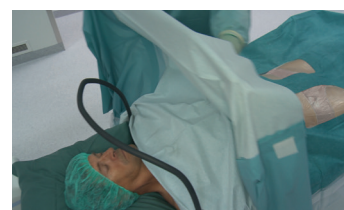


8. Fold afdækningen ud mod hovedet. Selvklæbende tape er på bagsiden af dækningen for sikker og let fastgørelse over anæstesiøjlen.

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
61800	Hybrid kardiovaskulært sæt 2 afdækninger med klæb 1 hybrid kardiovaskulær afdækning, incisionsfelt 60x40 cm og 15x27 cm (2) 1 bordafdækning, 75x190 cm absorberende område	75x75 240/300 x 450  150 x 190	5/10

Alt specificeret sætindhold er også tilgængeligt til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. (cm)
71800	Hybrid kardiovaskulært sæt	240cm / 300 x 450 Incision 60 x 40 Incision 15 x 27 Incision 15 x 27 Forstærkn. 90 x 220
910598	Afdækning med klæb	75 x 75 cm
90190	Bordafdækning	150 x 190

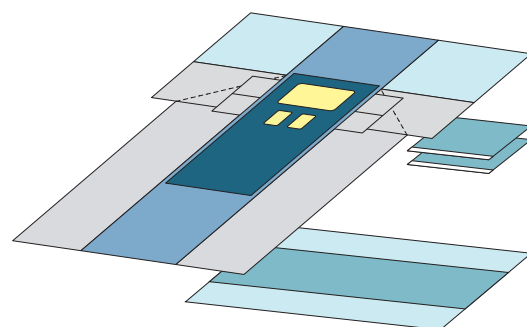

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0942008

  
**Mölnlycke®**