

BARRIER® Knæartroskopi- afdækning



- Væskeopsamlingspose for effektiv væskekontrol
- Væsketæt for at forebygge væskegennemtrængning og beskytte mod infektion
- Hurtig alt-i-en drapering, enkel og effektiv at håndtere for én person
- Kan også anvendes på et tippet bord

Draperingsvejledning




1. Fold bordafdækningen ud og placér den under patientens ben.



2. Dæk benet med stockinetten. Fold stockinettens absorberende komfortlag ind over sig selv for at undgå mikrobiel migration.



3. Fiksér den med OP-tape.

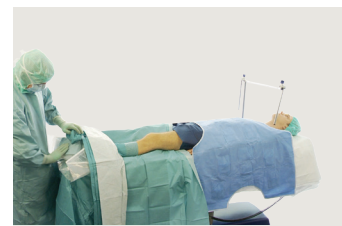

4. Bemærk piktogrammets retning. Placér den foldede artroskopiafdækning over patientens fod, og træk foden gennem afdækningen.



5. Fold den nederste del af afdækningen under patientens ben og placér de to elastiske åbninger rundt om knæet.



6. Fold den øverste del af afdækningen helt ud over hovedet. Brug klæbeområderne til at fastgøre posen.



7. Placér benet i passende vinkel for indgrebet. Drapering er nu afsluttet. Afdækningen kan også bruges på et tippet bord.

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Absorberende område	Pakning
60101	Knæartroskopisæt: 1 x Knæartroskopiafdækning, huller 7 og 5 cm elastisk 1 x Bordafdækning	230 x 320 cm 150 x 190 cm	75 x 190 cm	5 / 10
60102	Knæartroskopisæt: 1 x Assistancebordspose 4 x Papirhåndklæder 1 x Stockinette 2 x Op-tape 1 x Knæartroskopiafdækning, huller 7 og 5 cm elastisk 1 x Bordafdækning	79 x 145 cm 18 x 25 cm S 9 x 49 cm 230 x 320 cm 150 x 190 cm	65 x 85 cm 75 x 190 cm	4 / 8
60104	Knæartroskopiafdækning, huller 7 og 5 cm elastisk	230 x 320 cm		5 / 10
60105	Knæartroskopiafdækning, huller 7 og 5 cm elastisk, indpakket	260/300 x 320 cm		5 / 10

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Størrelse
70104	Knæartroskopiafdækning, huller 7 og 5 cm elastisk	230 x 320 cm
70105	Knæartroskopiafdækning, huller 7 og 5 cm elastisk, indpakket	260/300 x 320 cm

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes DKSU0422004

Mölnlycke[®]