

BARRIER®

Kraniotomisæt




- Procedurespecifik afdækning med integreret incisionsfilm og væskeopsamlingspose
- Ugennemtrængelig for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion
- Absorberende arbejdsområde og væskeopsamlingspose hjælper med at opretholde et tørt arbejdsområde
- Hurtig alt-i-en drapering, enkel og effektiv at drapere for én person
- Integreret, transparent og fleksibel incisionsfilm for sikker fastgørelse
- Integreret, stærk si for enkel og sikker opsamling af prøver

Draperingsvejledning



1. Skær gennem klæbekanten på én af afdækningerne.

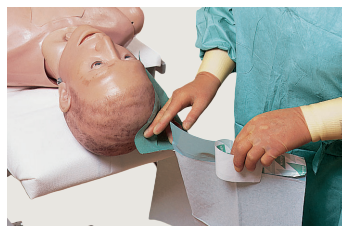

2. Start drapering på den ene side af incisionsfilmen.



3. Brug det skårede stykke til at forme afdækningen rundt om incisionsfeltet.



4. Brug den anden afdækning på den samme måde.




5. Fortsæt med kraniotomiafdækningen. Fjern beskyttelsespapiret og centrér afdækningen på incisionsfeltet og fiksér.




6. Start med at folde afdækningen ud nedad.



7. Fold den ud mod siderne og over bordet eller anæstesiøjlen.

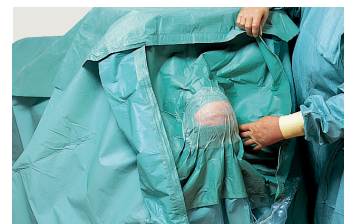

8. Draperingen er nu afsluttet.

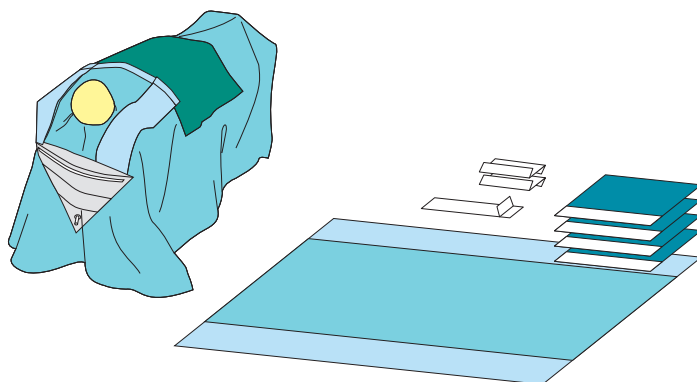

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
888142	Kraniotomisæt: 1 Assistancebordspose 2 Papirhåndklæder 1 OP-tape 4 Afdækninger med klæb 1 Bordafdækning 1 Kraniotomiafdækning, pose, incisionsfelt 30 x 30 cm	79 x 145 18 x 25 9 x 49 50 x 50 150 x 190 230 x 300	5/10
888242	Kraniotomisæt 2 Papirhåndklæder 1 OP-tape 4 Afdækninger med klæb 1 Bordafdækning 1 Kraniotomiafdækning, pose, incisionsfelt 30 x 30 cm	18 x 25 9 x 49 50 x 50 150 x 190 230 x 300	5/10

Alt specificeret sætindhold er også tilgængeligt til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Size (cm)
965524	1 Kraniotomiafdækning, pose, incisionsfelt 30 x 30 cm	230 x 300

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0592005

Mölnlycke[®]