

BARRIER® Universalsæt ISCC




Bæredygtige
forbedringer



- Forstærket område med slangeholdere
- Ugennemtrængeligt materiale
- Absorberende toplag
- Bæredygtige forbedringer
- ISCC certificerede operationsafdækninger understøtter produktionen af bæredygtige materialer
- Transportkarton og inderæske er fremstillet af cellulose træmateriale fra FSC™ certificerede kilder

Draperingsvejledning

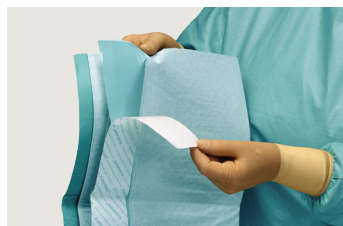


1. Fjern beskyttelsespapiret fra afdækningen med klæb.



2. Fiksér afdækningen langs patientens side begyndende ved skulderen. Følg kroppens konturer mens du passer på ikke at strække materialet.



3. Hold afdækningen med klæb (175x175) i folden. Fjern den midterste del af beskyttelsespapiret.

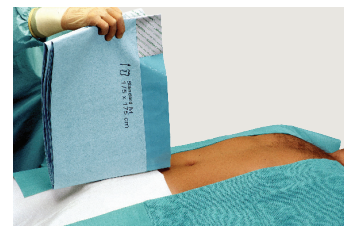

4. Placér den foldede afdækning over midten af brystkassen.



5. Fjern resten af beskyttelsespapiret og fiksér kanterne.



6. Fold resten af afdækningen ud over patientens ben.



7. Placér den store afdækning over midten af patientens bryst. Fjern resten af beskyttelsespapiret og fiksér kanterne.



8. Fold resten af afdækningen ud over anæstesiøjlen og fiksér sug og diatermi.



60054 Universalsæt Standard: Inderæske 6 stk. / Transportkarton 12 stk.

Transportkarton og inderæske er FSC™ Mix mærket. FSC™ Mix mærket betyder, at træet anvendt i indpakningsmaterialet er fra FSC™-certificerede skove, genanvendt materiale og kontrolleret træ.

Genbrugssymbolet betyder, at vores kartoner og æsker kan genanvendes og deres fibre kan bruges igen.

Beskrivelse	Størrelse (cm)	Målværdi for celluloseindhold i hver enkelt produkt* (absorberende lag)	Andel af materiale i hver enkelt produkt som har en mass balance** tilgang (væsketæt lag)
1 × Assistancebordspose	79 × 145	7%	0%
2 × Afdækning med klæb	90 × 75	24%	41%
4 × Papirhåndklæde	18 × 25	100%	0%
1 × OP-tape	9 × 49	0%	0%
1 × Afdækning med klæb	175 × 175	24%	50%
1 × Afdækning med klæb	150 × 240	24%	49%
1 × Bordafdækning	150 × 190	12%	0%

*Afdækningen indeholder biobaserede træ cellulose fibre

**Afdækningsmaterialet er lavet med målværdi x % af råmateriale fra ISCC certificerede kilder

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
 Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0022102
 FSC er et varemærke tilhørende The Forest Stewardship Council A.C.

Mölnlycke®