

Leitfaden für den Verbandwechsel



Nutzen Sie **Mepilex® Border Sacrum** für die Behandlung Ihrer Wunde.

Anwendung:

1. Waschen Sie Ihre Hände für 20 Sekunden mit Seife und warmen Wasser.
2. Reinigen Sie die Wunde, wie von Ihrer Pflegekraft empfohlen, und trocknen Sie die umliegende Haut gründlich ab.
3. Entfernen Sie die mittlere Folie, indem Sie vorsichtig an dem lila-farbenen Rand ziehen.




4. Falten Sie den Schaumverband mit der haften Seite nach außen. Spreizen Sie vorsichtig das Gesäß und legen Sie den Schaumverband so an, dass die Spitze des Verbandes das Steißbein bedeckt.



5. Entfernen Sie nacheinander die seitlichen Folien und streichen Sie den Verband glatt.



6. Der Verband hat nun die gewünschte Position.

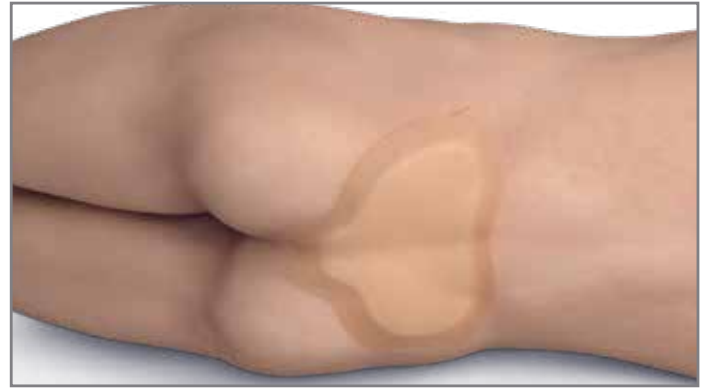

Wann sollte der Verband gewechselt werden?

Ihre Pflegekraft empfiehlt Ihnen einen Verbandwechsel, wenn...

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie Ihre Pflegekraft:

Bitte beachten Sie:

- ✓ Der Verband Mepilex® Border Sacrum ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nicht wiederverwendet werden.

Auf unserer Webseite zeigen wir Ihnen in einem kurzen Video, wie Sie den Verband anlegen können. Scannen Sie hierfür einfach den Code mit Ihrem Handy oder besuchen Sie uns auf:



www.molnlycke.at/produkte-losungen/mepilex-border-sacrum

Mepilex® Border Sacrum Wundverbände sollten grundsätzlich von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Falls kein medizinisches Fachpersonal verfügbar ist, kann es notwendig sein, dass ein Familienmitglied oder Sie selbst den Verbandwechsel durchführen müssen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung oder Haftung bzgl. der Anwendung des Verbandes. Entsprechend geschieht die Anwendung von Mepilex® Border Sacrum, wenn diese nicht von einer medizinischen Fachkraft umgesetzt wird, auf eigene Gefahr.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.at

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Tel.+43 1 278 85 42-0, info.at@molnlycke.com. Mölnlycke®, Mepilex® Border Sacrum sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0103


Mölnlycke®