

Fortschrittliche Unterdruck-Wundtherapie erzielt überzeugende Ergebnisse

Avance® Solo Adapt ist ein modulares, batteriebetriebenes Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT) zur Einmalverwendung bei der Behandlung von Dekubitus. Avance Solo Adapt wurde entwickelt, um die schnellere Wundheilung und eine verbesserte Patientenmobilität zu fördern sowie das Infektionsrisiko zu reduzieren.

Die Avance® Solo Adapt-Pumpe bietet optische Signale und akustische Alarme bei **Leckage, Blockade und niedrigem Batteriestand**^{1,2} – **so können etwaige Probleme sofort behoben und die Behandlung fortgesetzt werden**³

Erzeugt **14 Tage** lang einen kontinuierlichen Unterdruck von **-125 mmHg**^{4,5}

Das regelmäßige Pulsieren der Pumpe **zeigt an, dass das System aktiv ist und kontinuierlich überschüssiges Exsudat entfernt**, um den erwünschten Unterdruck aufrechtzuerhalten

Die CFM-Technologie (Controlled Fluid Management) **steuert das Exsudat-Management und ermöglicht dem System, den Unterdruck aufrechtzuerhalten**, indem überschüssiges Exsudat an einen Kanister abgeleitet wird⁵⁻⁷.

Die CFM-Technologie™ (Controlled Fluid Management) mit **dualen Lumen** sorgt für einen kontrollierten Unterdruck und ein effektives Exsudatmanagement.



Der Wundfüller ist **flexibel und zuschneidbar**

Avance® Solo Adapt Filmverband mit Safetac®-Technologie **passt sich Körperkonturen sowie schwer zu versorgenden Körperstellen an und ermöglicht ein Anheben und erneutes Anpassen der Folie während der Applikation**⁸

Avance® Solo Adapt


Mölnlycke®

Die Funktionsweise von Avance® Solo Adapt

Avance® Solo Adapt ist ein batteriebetriebenes Unterdruck-Wundtherapiesystem zur Einmalverwendung, das Exsudat von der Wunde zu einem 50-ml-Kanister transportiert. Es erzeugt einen kontinuierlichen Unterdruck von -125 mmHg^5 und ist bei Dekubitus anwendbar.

Die Vorteile von Avance® Solo Adapt

- Erzeugt 14 Tage lang einen Unterdruck von $-125 \text{ mmHg}^{4,5}$
- Die CFM-Technologie (Controlled Fluid Management) sorgt für ein kontrolliertes Exsudatmanagement. Dadurch ist das System in der Lage, den Unterdruck aufrechtzuerhalten und überschüssiges Exsudat an den 50-ml-Kanister abzuführen^{5,7}.
- Der Avance® Solo Adapt-Filmverband mit Safetac®-Technologie passt sich Körperkonturen sowie schwer zu versorgenden Körperstellen an und ermöglicht ein Anheben und erneutes Anpassen des Filmverbands während der Applikation⁸.
- Set enthält zuschneidbaren Schaum/Wundfüller
- Die Avance® Solo Adapt-Pumpe bietet optische Signale und akustische Alarme bei Leckage, Blockade und niedrigem Batteriestand^{1,2}.

Anwendungsbereich

Unterdruck-Wundtherapie für chronische Wunden (dNPWT) - Dekubitus

Avance® Solo Adapt ist ein NPWT-System zur Anwendung bei Dekubitus. Es umfasst einen anpassungsfähigen Verband für anatomische Körperkonturen und stellt eine gute Abdichtung sicher.



Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Avance® Solo Adapt Bestellinformationen

Avance Solo Adapt Starter-Set und kombinierbare Einzelkomponenten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Avance Solo Adapt Starter-Set - chronische Wunden (dNPWT)				
9994152	Avance Solo Adapt Starter-Set Pumpe und 50 ml Kanister mit Schlauch, inkl. Safetac Filmverband 20 x 27 cm mit Schlauch, Wundfüller sowie 4 x AA Batterien und Gürtel-Clip	16821822	1	2
Einzelkomponente / Zubehör				
994152	Avance Solo Adapt Safetac Filmverband 20 x 27 cm mit Schlauch, Wundfüller	16821839	5	10
994000	Avance Solo Adapt Safetac Filmverband 20 x 27 cm	16821845	5	10
882000	Avance Solo Wundfüller 1,5 x 10 x 12 cm	16821816	4	8
880050	Avance Solo Kanister 50 ml mit Schlauch	16821868	4	8

Einzelkomponenten können flexibel während der Therapie mit dem Starter-Set nach Bedarf ergänzt werden.

Referenzen: 1. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 7]. 2. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 8]. 3. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 6]. 4. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 4]. 5. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 2]. 6. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 5]. 7. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 9]. 8. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv [Qu. 3].

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland. T +49 211 920 880. www.molnlycke.de
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich. T +43 1 278 85 42. www.molnlycke.at
Die Marken Mölnlycke, Avance und Safetac sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEAM001984
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>

