

Itsehoito-opas sidosten vaihtoon

Hoitajasi on valinnut Exufiber® -sidoksen haavallesi

Miten Exufiber®-sidosta käytetään:

Poista nykyiset sidokset

1. Pese käsiä saippualla ja lämpimällä vedellä 20 sekunnin ajan.
2. Poista Exufiber-sidosta edeltävä ulompi sidos. Laita käytetyt sidokset roskiin.
3. Pese kädet huolellisesti uudelleen ja pue käsineet (jos käytössä) ennen uusien sidoksien laittamista.

Laita uudet sidokset paikalleen

1. Puhdista haava hoitajan ohjeiden mukaan ja kuivaa ympäröivä iho huolellisesti.
2. Poista Exufiber-sidos pakkauksestaan ja laita se haavan päälle. Sidoksen tulee ulottua pienissä kokoluokissa vähintään 1–2cm ja isoissa kokoluokissa vähintään 5cm haavan reunojen yli kuivalle iholle. Sidos kutistuu, kun se imee itseensä haavaeritettä ja alkaa geeliytyä.
3. Kiinnitä Exufiber-sidos paikalleen hoitajasi tarjoaman päällimmäisen sidoksen avulla.



Milloin sidos tulee vaihtaa?

Hoitajasi neuvoo, kuinka usein Exufiber-sidos vaihdetaan.

Pyydä lisäapua ja neuvoja hoitajaltasi:

Muistettavaa:

- ✓ Exufiber-sidos on tarkoitettu kertakäyttöön eikä sitä saa käyttää uudelleen.

Exufiber-sidos on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsiteltäväksi ja käytettäväksi, mutta jos terveydenhuollon ammattihenkilöä ei ole saatavilla, sidoksen käyttäjä tai tämän perheenjäsen voi joutua vaihtamaan sen. Tällöin valmistaja ei kuitenkaan vastaa sidoksen käytöstä. Jos Exufiberiä käyttää kuka tahansa muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö, se tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Lue lisää: www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300.
Mölnlycke- ja Exufiber-tavaramerkit, -nimet ja -logot ovat yhden tai useamman Mölnlycke Health Care -yhtymän yhtiön maailmanlaajuisesti rekisteröimiä. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. HQIM001709