

BARRIER® Trousse de tête / cou

- Plié de façon optimale pour une utilisation stérile
- Solution de drapage permettant une utilisation rapide et aisée. Peut être apposé en toute simplicité par une seule personne
- Solution de drapage flexible pour toutes les interventions au niveau de la tête / du cou





1 Tournez le champ dans la bonne position (voir pictogramme).



2 Dépliez le champ pour apercevoir le pictogramme.



3 Un pictogramme indique le sens dans lequel le champ doit être tenu. Deux autres pictogrammes vous indiquent la position des mains.



4 Glissez vos mains dans les coins et dépliez complètement le champ.



5 Placez le champ sous la tête et partiellement sous les épaules du patient.



6 Attrapez le coin du laminé et tirez le champ au-dessus du patient. Remarque: Tenez le coin du spunlace dans l'autre main, voir illustration suivante.



7 Tirez le champ vers les pieds du patient. Répétez l'opération des deux côtés. Couvrez le patient avec le champ.



8 Saisissez un côté du spunlace...



9 ... et positionnez-le autour de la zone du visage / du cou qui subira l'intervention.



10 Fixez l'autre extrémité du champ tout en veillant à le maintenir dans la bonne position.



11 Utilisez la bande adhésive pour fixer la coiffe.



12 Positionnez la couverture adhésive et dépliez-la en direction des pieds.

Code stérile

696940

Trousse de tête

826900

Champ de tête / cou