


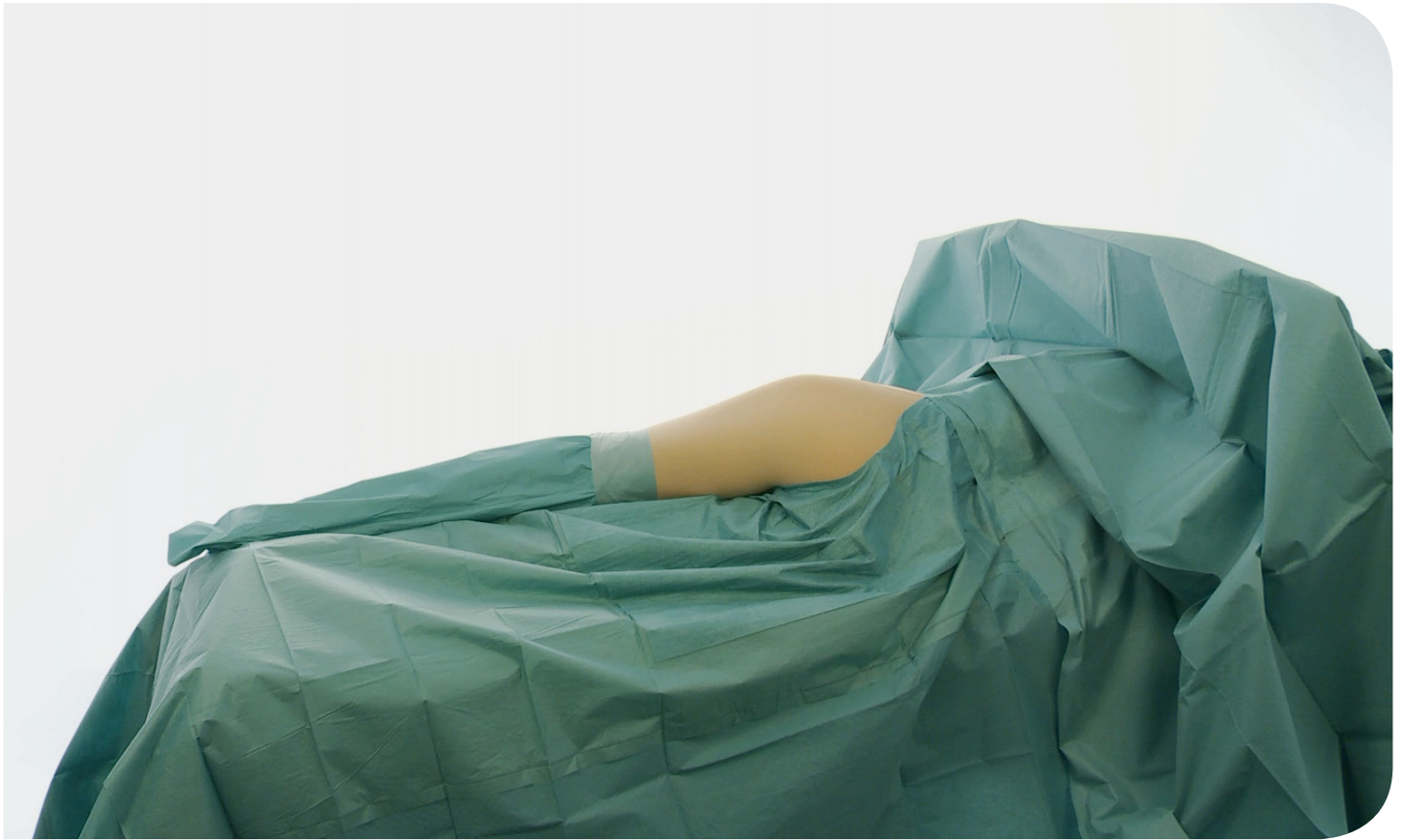

BARRIER® Trousse de hanche avec Drisite® Plus

- Matériaux résistants et renforcés dans la zone critique, pour une qualité fiable et un haut degré de résistance à la déchirure.
- Drisite® Plus* assure une absorption et une gestion efficace des fluides
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient
- Pliage optimal, pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne

* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une barrière sèche, résistante et absorbante.

Instructions d'utilisation




1. Commencez par déplier le champ de table et posez-le sous la jambe du patient.



2. Glissez la jambe dans la stockinette. Repliez la couche confort absorbante de la stockinette vers l'intérieur pour éviter tout risque de contaminations microbiennes. Fixez-la avec les bandes adhésives.



3. Posez le champ fendu sous la jambe du patient.

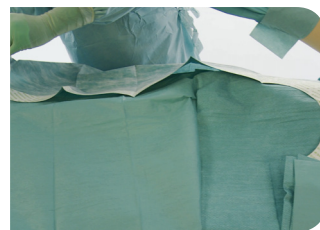

4. Dépliez d'abord les parties latérales du champ puis la partie destinée à recouvrir les pieds. Retirez le papier protecteur.



5. Positionnez la fente autour et en dessous de la zone génitale et le long du corps. Fixez l'autre côté le long de la hanche et du torse.



6. Retirez le papier protecteur de la partie centrale du champ d'anesthésie. Placez vos mains sous le champ plié et installez-le sur le patient.



7. Dépliez partiellement le champ puis retirez le 2^e et le 3^e papier protecteur. Dépliez le reste du champ, d'abord vers vous puis du côté opposé.



8. Terminez en déployant le champ vers la tête du patient. Le champ est en place.

Scannez le code QR pour plus d'informations sur Mölnlycke ou pour visionner des vidéos d'instructions.



N° de réf.	Description	Disp/Trp
60604	Trousse de hanche 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de protection 75x90cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 champ 90x150cm 3 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm 1 champ adhésif 300x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
60606	Trousse de hanche 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ fendu (plastique) 150x193cm, fente 15x61cm 1 stockinette 32x120cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu 200x260cm, fente 7x102cm 1 champ adhésif 240x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8

N° de réf.	Description	Disp/Trp
60608	Trousse de hanche 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de protection 75x90cm 1 housse de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 stockinette 32x120cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm 1 champ adhésif 300x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
60609	Trousse de hanche 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de protection 75x90cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 stockinette 32x120cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu 200x260cm, fente 7x102cm 1 champ adhésif 300x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
60611	Trousse de hanche 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de protection 75x90cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 stockinette 32x120cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu 230x330cm, fente 20x102cm 1 champ adhésif 300x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
60613	Trousse de hanche 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm 1 champ adhésif 300x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	5/10
60615	Trousse de hanche 2 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 champ de table 100x150cm, 75x150cm absorbant 1 champ fendu (plastique) 150x193cm, fente 15x61cm 1 champ fendu 230x330cm, fente 20x102cm 1 passe-tubulure 5x15cm 1 bande adhésive 9x49cm 1 champ adhésif 300x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 champ d'emballage 100x100cm	4/8
60616	Trousse de hanche 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ 75x90cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 stockinette 32x120cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu 250x290cm, fente 20x102cm 1 champ adhésif 300x175cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8

N° de réf.	Composants de trousse
70503	Champ fendu adhésif 200x260cm, fente 7x102cm, patch 70x100cm
70504	Champ fendu adhésif 200x260cm, fente 20x102cm, patch 70x100cm
70511	Champ fendu adhésif 230x330cm, fente 20x102cm, patch 70x160cm
70513	Champ fendu adhésif 250x290cm, fente 20x102cm, patch 70x160cm

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, BE-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.

Le nom et le logo de Mölnlycke®, Drisite® Plus et BARRIER® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00871702)

