



Mölnlycke®

Trousse R.T.U. BARRIER®

- Poche de recueil intégrée pour une gestion efficace des fluides
- Tamis solide intégré pour que les échantillons de tissu puissent être recueillis facilement et en sécurité
- Doigtier sans latex intégré pour une palpation rectale sûre
- Ouverture suprapubienne avec des bords adhésifs pour une drapage efficace
- Des renforcements en metal couverts dans les coins soutiennent la poche de recueil quand celle-ci se déplie et on peut également les utiliser en toute sécurité
- Disponible en deux tailles pour répondre aux différents besoins



BARRIER crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. Nos solutions novatrices et produits-spécifiques sont complétées avec options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.

Instructions



1 Positionnez le champ avec le pictogramme dans la direction correcte.



2 Ouvrez le champ entre les jambes du patient. Faites attention aux flèches (pictogramme).



3 Dépliez le champ.



4 Couvrez une jambe.



5 Faites la même chose avec l'autre jambe.



6 Dépliez le champ au-dessus des jambes, puis vers la tête du patient et couvrez l'arceau d'anesthésie



7 Le drapage est fini.

N° de référence	Description	Emballage
888222	Trousse R.T.U. 1 Cellduk 1 Passe-tubulure 9x18 cm 1 Champ R.T.U. 175/270x180 cm avec poche de recueil, ouvertures 8 cm et 5 cm, doigtier 1 Champ de table 150x190 cm, 75x190 cm absorbant	6/12
888224	Trousse R.T.U. 1 Cellduk 1 Passe-tubulure 9x18 cm 1 Champ R.T.U. 175/270x180 cm avec poche de recueil/tuyau, ouvertures 8 cm et 5 cm, doigtier 1 Champ de table 150x190 cm, 75x190 cm absorbant	7/14
888225	Trousse R.T.U. 1 Cellduk 1 Passe-tubulure 9x18 cm 1 Champ R.T.U. 175/270x180 cm avec tamis, ouvertures 8 cm et 5 cm, doigtier 1 Champ de table 150x190 cm, 75x190 cm absorbant	7/14
888226	Trousse R.T.U. 1 Cellduk 1 Passe-tubulure 9x18 cm 1 Champ R.T.U. 175/270x240 cm avec poche de recueil, ouvertures 8 cm et 5 cm 1 Champ de table 150x190 cm, 75x190 cm absorbant	6/12

Tous les composants spécifiés sont disponibles pour les trousse ProcedurePak®.

Champs opératoires BARRIER

- Matériaux 100% impérmeables pour une sécurité optimale du patient
- Pliés de façon optimale et pour un emploi aseptique, utilisables pour une seule personne en toute simplicité
- Conditionnement agréable d'emploi avec une boîte distributrice et un emballage pelable.