



Mesorb®

PANSEMENT ABSORBANT, SEMI-PERMÉABLE ET NON ADHÉRENT


Mesorb® est un pansement doux hautement absorbant capable de retenir de grandes quantités d'exsudats. La semi-perméabilité empêche les liquides de traverser le pansement et de souiller les vêtements et draps de lit.

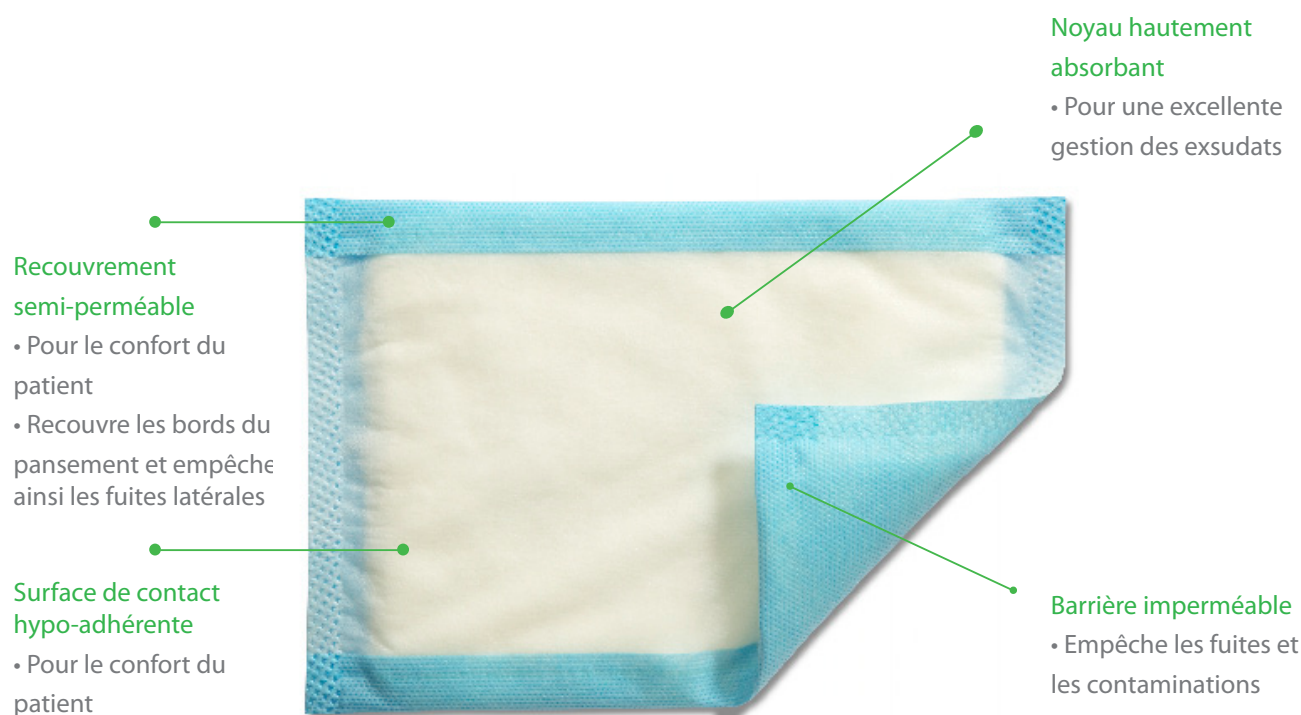


Mode d'emploi

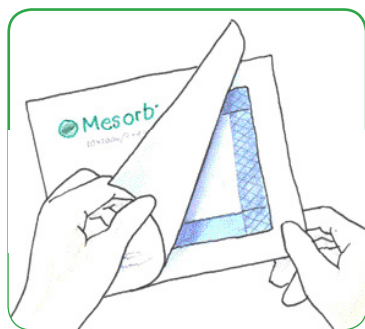

Retirez le pansement de son emballage.

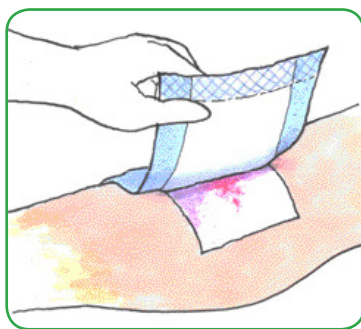

Appliquez Mesorb® sur la plaie ou sur le pansement primaire en prévoyant un bord d'au moins 1 cm sur la peau péri-lésionnelle.

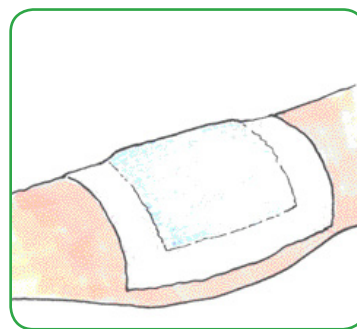

Fixez à l'aide d'un système de fixation adapté (ex. : Mefix®, Mepore® Film ou Tubifast®)

Mode d'action de Mesorb®

L'exsudat de la plaie est absorbé par la surface de contact et transféré vers le noyau absorbant. Celui-ci faisant également office de coussin protecteur et respirant. Le film protecteur empêche la contamination de la plaie par des agents extérieurs et empêche les exsudats de traverser le pansement et de souiller les vêtements et draps de lit. Le film recouvre également les bords du pansement et empêche ainsi les fuites latérales.

Avantages

- Grand capacité d'absorption
- Coussin protecteur
- Semi-perméable
- Economique
- La barrière anti-fuites réduit la fréquence des changements de pansement et empêche les exsudats de souiller les vêtements et draps de lit

Mesures de précaution

Ne pas utiliser Mesorb® sur des plaies infectées sans avis médical.

Indications

- Plaies moyennement à fortement exsudatives
- Comme pansement primaire (directement sur la plaie)
- Comme pansement secondaire, lorsqu'une capacité d'absorption plus importante est requise (en association avec Mepitel® ou Mepilex® Transfer).

Fréquence des changements

Mesorb® peut rester en place plusieurs jours en fonction de l'état de la plaie et de la peau ou de la prescription du médecin.



Mesorb assortiment

Réf.	Dim. (cm)	Code CNK	Pcs/RET	Pcs/TRP
677001	10x13	2490-498	50	400
677201	13x15	2490-514	50	300
677401	10x23	2490-522	50	300
677601	15x23	2490-530	50	300
677701	23x25	2490-555	30	120
677801	23x30	2490-563	30	120

Plus d'info sur www.molnlycke.com/be-fr

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstationstraat 72/2, 2600 Berchem, Belgique. Tél +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52

Mölnlycke Health Care, Mesorb sont des marques et des logos déposés par la société Mölnlycke Health Care AB.
© 2010 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.


Mölnlycke®