

メピレックス® ライト — その他の使用方法



気管切開チューブ周囲の放射性潰瘍




足趾先端部の創傷など



外傷、潰瘍など


メピレックス® ライトの使用方法

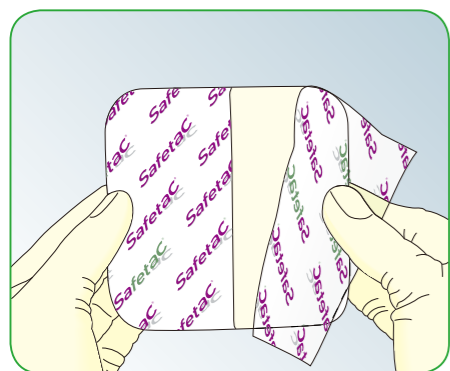

創部や周辺皮膚を洗浄します。
剥離フィルムを剥がします。



創の辺縁部より2cmほど大きく、周辺皮膚を十分に覆うサイズを貼付します。

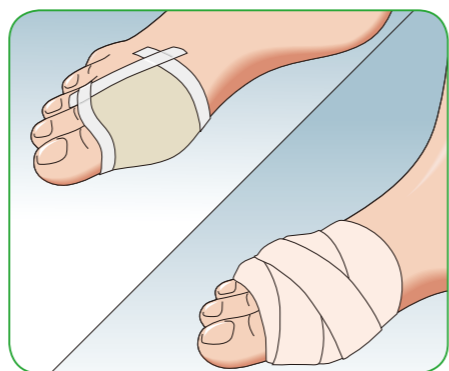

必要に応じて、テープ、包帯などで固定してください。

メピレックス® ライト

管理医療機器
局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
認証番号: 22300BZX00052000

【保険適用】

種類: 特定保険医療材料
保険請求名: 皮膚欠損用創傷被覆材 メピレックス ライト
保険適用範囲: 真皮に至る創傷用
適用期間: 2週間を標準として特に必要と認められた場合については3週間を限度とする*
保険請求: 償還価格による

*区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合を除く

臨床的創感染を有する患者には慎重に使用してください。
「使用方法及び使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

*再使用禁止

メピレックス® ライト

製品番号	サイズ cm	償還面積 cm ²	枚/箱
284000	6×8.5	51	5
284100	10×10	100	5
284300	15×15	225	5
284500	20×50	1000	4



メピレックス® ライトの固定には

ソフトシリコン固定テープ
Mepitac®
メピタック®



伸縮性包帯 チューブ型/衣類型
Tubifast®
チュービファースト®



Less pain. Less trauma.

メンリッケヘルスケアは、ソフトシリコンを用いた、痛みや組織損傷の少ない創傷被覆・保護材を開発し、患者様の視点からの“アウトカム”向上を提唱しております。

製造販売業者
メンリッケヘルスケア株式会社
東京都新宿区西新宿6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
TEL: 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ
メンリッケヘルスケア株式会社
 wound care 事業部
TEL: 03-6279-0991

Safetac®, Mepilex®, セーフタック®, メピレックス® はMölnlycke Health Careの登録商標です。

Mölnlycke®

References:

1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol.4, No 1, 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10.

160252_ML10005-1

Mepilex® Lite

メピレックス® ライト

Mepilex® Lite



Mölnlycke®

患者様に「やさしさ」と「安心感」を

皮膚にやさしい薄いタイプのソフトシリコン・ポリウレタンフォーム


Mepilex[®] Lite

メピレックス[®] ライトは、薄いタイプのソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材です。脆弱な皮膚にやさしく、滲出液を吸収、創傷治癒に必要な湿潤環境を整えます。

Point 1 皮膚にやさしいセーフタック[®]


- セーフタック技術により、ドレッシング交換時の「痛み」や「組織損傷」を軽減します。^{1,2}
- 滲出液のある創部には固着せず、皮膚にやさしく密着します。
- セーフタックのシーリング力により、浸軟を軽減します。

従来の粘着剤

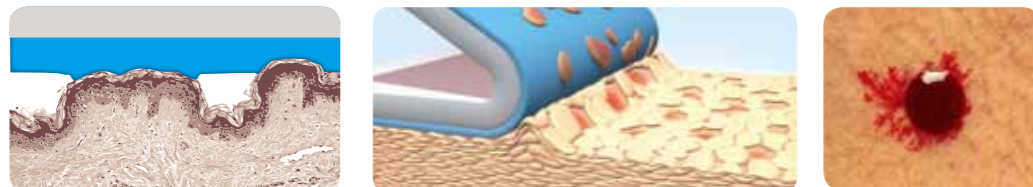

皮膚凹凸部の一部分にのみ粘着剤が接着するためドレッシング交換時に、粘着剤接触部に強い力がかかり、表皮剥離のリスクがあります。 ▲滲出液が横漏れするリスク

セーフタック

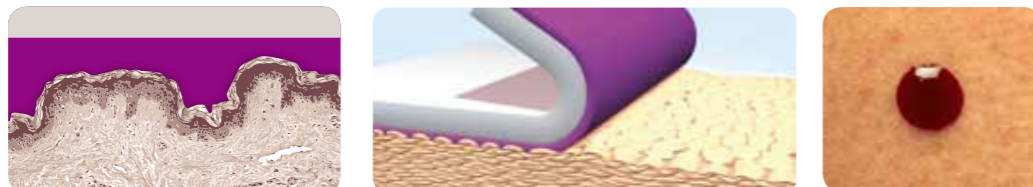

皮膚の凹凸部に密着し、広い接触面で固定力を確保しているため、ドレッシング交換時の表皮剥離のリスクを軽減します。 ▲滲出液が横漏れしない

当社救急絆創膏との比較(自社データによる)

Point 2 創傷治癒を促す適切な湿潤環境を保持

- 高い吸収力と適度な水蒸気透過性で滲出液を管理します。
- 滲出液を垂直に吸収し、浸軟を軽減します。

Point 3 薄くやわらかい

- やわらかく適度な粘着力で屈曲部などにも密着します。
- 創部の形状、大きさによってカットして使用できます。



ポリウレタン背面フィルム


通気性、防水性に優れ、バクテリアやウイルスの侵入を防ぎます。

親水性ポリウレタンフォーム

高い吸収力で滲出液をしっかり吸収、過剰な水蒸気を透過し、適切な湿潤環境を保ちます。

バクテリア/ウイルス

過剰な水蒸気

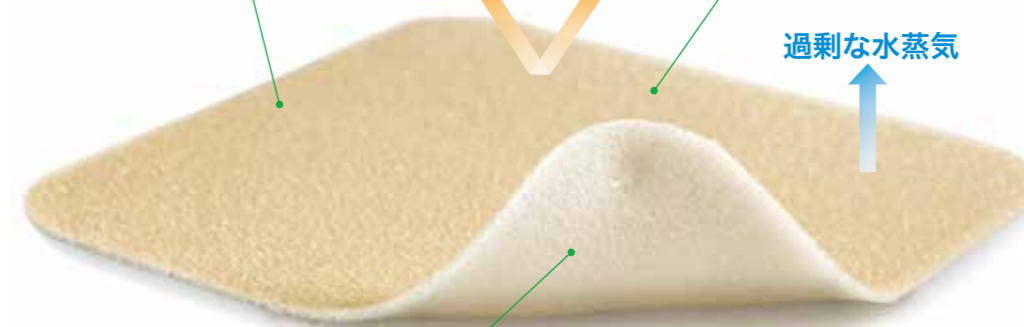

セーフタック[®]による皮膚接触面

ソフトシリコンを用いたセーフタックにより、皮膚にやさしく密着し、やわらかく適度な粘着力で脆弱皮膚の患者様にも安心してお使いいただけます。

SafetaC[®]
TECHNOLOGY

●メピレックス[®] ライト適用症例

メピレックス[®] ライトは、滲出液が少量から中等量の真皮に至る創傷に適しています。やわらかく適度な粘着力で脆弱皮膚にも安心してお使いいただけます。



表皮水疱症



顔面外傷



放射線潰瘍



手掌熱傷(浅達性Ⅱ度熱傷)



写真提供：多根総合病院 形成外科部長 若見 暁樹 先生