

# Mepilex<sup>®</sup>

メピレックス<sup>®</sup>

## 脆弱皮膚に安心の滲出液管理 皮膚にやさしいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム

- 交換時の痛みや組織損傷を軽減します<sup>1, 2</sup>
- 高い吸収力で滲出液の管理に効果的です
- やわらかく適度な粘着力で皮膚に追従します
- 創部の大きさや形状にあわせてカットが可能です

### セーフタック<sup>®</sup>による皮膚接触面

- ドレッシング交換時の痛みと組織損傷を軽減します<sup>1, 2</sup>
- 滲出液のある創部には固着せず、やさしく皮膚に密着します
- セーフタック<sup>®</sup>のシーリング効果により、浸軟を軽減します<sup>3</sup>

### 親水性ポリウレタンフォーム

- 高い吸収力で滲出液を管理します
- 追従性が高く皮膚に密着します

### ポリウレタン背面フィルム

- 通気性
- 防水性
- バクテリア/ウィルスバリアー



## SafetaC<sup>®</sup> テクノロジー


セーフタックは、メンリッケヘルスケアが開発したソフトシリコンを使用した粘着技術です。セーフタック粘着技術を使用したドレッシング材は、ドレッシング交換時の患者様の痛みや創床及び創周囲皮膚の組織損傷のリスクを軽減します。また、皮膚の凹凸部にも密着するセーフタック粘着材は、創縁をしっかりとシールするので、創周囲の浸軟リスクも軽減します。

左図：従来の粘着剤(当社救急絆創膏との比較 自社データによる)

右図：セーフタック




ドレッシング交換時に、粘着剤接触部に強い力がかかり、表皮剥離のリスクがあります。

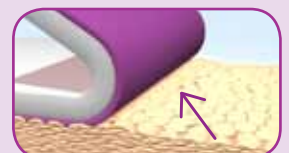

ドレッシング交換時の表皮剥離のリスクを軽減します。

## メピレックス®の使用法

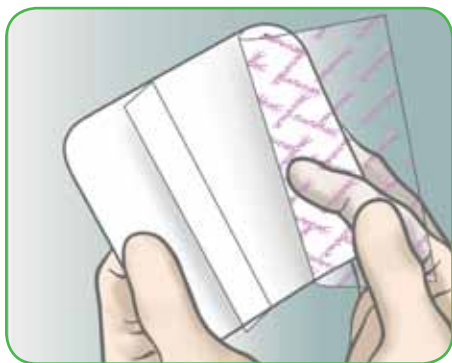

創部や周辺皮膚を洗浄します。  
剥離フィルムを剥がします。



創の周辺部より2cmほど大きく、周辺皮膚を十分に覆うサイズを引っ張らずに貼付します。



必要に応じて、テープ、包帯などで固定してください。

### 脆弱皮膚に安心の滲出液管理

#### 皮膚にやさしいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム

メピレックスは、やわらかく高い追従性を備えたフォームドレッシングです。滲出液を吸収し、創治癒に必要な湿潤環境を整えます。本製品は中程度から多量までの滲出液に適しています。皮膚接触面にはセーフタックを使用しているため、シーリング効果により滲出液の横漏れを防ぎ、浸軟を軽減し、ドレッシング交換時の痛みや組織損傷を軽減します。

### メピレックス®の特徴

- ドレッシング交換時の痛みと組織損傷を軽減します。
- 創部に適度な粘着力で密着するので、ドレッシングを手で押さえることなく、圧迫包帯や固定用ドレッシングを適用できます。
- 創の形状や大きさにあわせて切ってお使いいただけます。
- 追従性が高いので、患者様が快適にお使いいただけます。
- 創の状態に応じて、数日間お使いいただけます。
- セーフタックのドレッシング材は低アレルギー性で皮膚かぶれなどのリスクを軽減します。
- 20cm×50cmやヒールタイプ等を揃えた豊富なサイズ展開をしています。
- セーフタックのやさしい自着力で、脆弱皮膚の患者様にも安心してお使い頂けます。

### 適応症例

メピレックスは、下腿潰瘍、褥瘡等の慢性創傷やスキんテア、熱傷等に適しています。



### 注意

臨床的創感染を有する患者には慎重に使用してください。「使用方法及び使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。



#### メピレックス®

高度管理医療機器  
二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材  
承認番号: 22500BZX00375000

#### 【保険適用】

種類: 特定保険医療材料  
保険請求名: 皮膚欠損用創傷被覆材 メピレックス  
保険適用範囲: 皮下組織に至る創傷用 標準型  
適用期間: 2週間を標準として特に必要と認められた場合については3週間を限度とする  
保険請求: 償還価格による

#### 【使用目的又は効果】

皮下脂肪組織までの創傷(III度熱傷を除く)に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

#### \*再使用禁止

### 製品サイズ

	製品番号	ドレッシングサイズ cm	保険算定面積 cm <sup>2</sup>	枚/箱
標準	294100	10×10	100	5
	294300	15×15	225	5
	294400	20×20	400	5
	294500	20×50	1,000	2
楕円	294200	10×20	200	5
	288100	13×20	198	5

製造販売業者  
メンリッケヘルスケア株式会社  
東京都新宿区西新宿6-20-7  
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト  
TEL: 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ  
メンリッケヘルスケア株式会社  
ウンドケア事業部  
TEL: 03-6279-0991

SafetaC<sup>®</sup>、Mepilex<sup>®</sup>、セーフタック<sup>®</sup>、メピレックス<sup>®</sup>はMölnlycke Health Careの登録商標です。

  
Mölnlycke<sup>®</sup>