

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 手術用被覆・保護材 34654000  
(熱傷被覆・保護材 11322101)

## メクストラ

## 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止**【形状・構造及び原理等】****\*\* 1. 構造**

本品は吸水性のある層状の被覆・保護材である。

**\*\* 2. 形状、寸法**

製品番号	外形サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	入り数
610000	12.5×12.5	10×10	10枚/箱
610100	12.5×17.5	10×15	10枚/箱
610200	12.5×22.5	10×20	10枚/箱
610300	17.5×22.5	15×20	10枚/箱
610400	22.5×27.5	20×25	10枚/箱
610500	22.5×32.5	20×30	10枚/箱

**\* 3. 材質**

ポリプロピレン、超吸収性粒子含有パッド、不織布

**4. 原理**

滲出液は、創面接触層の繊維の間隙を通り吸水パッドに移動し、内部の超吸収性粒子で吸収・保持される。

**【使用目的又は効果】**

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。また、熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。

**【使用方法等】****\*\* 1. 前処置**

(1) 本品を被覆する前に、通常の方法により生理食塩液等で創傷部を十分洗浄する。

**\*\* 2. 使用方法**

- (1) 創傷の大きさに応じ、創傷部の周囲を十分に覆うことが出来る適切な製品サイズを選ぶ。
- (2) 必要に応じて、創傷部にメピテル ワン、メピテル等一次ドレッシングを貼付する。
- (3) 本品の白いパッド面（創面接触層）を創面に向けて被覆する。このとき、パッドが乾燥した創周囲皮膚に2 cm以上被るように貼付する。
- (4) 包帯やテープ等で本品を固定する。

**\*\* 3. 交換時期**(1) 本品は、数日間被覆出来るが、創傷部や滲出液の状態（本品のパッドの端まで広がる前）に応じて交換する。**【使用上の注意】****1. 重要な基本的注意**

- (1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状が現れた場合には、医師に相談し、適切な処置をすること。
- (2) 被覆・保護材や本品の原材料に対するアレルギーが既知の患者に使用しないこと。

**2. 不具合・有害事象****\*\* 一般的な創傷被覆・保護材の使用における「有害事象」****<その他の有害事象>**

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・ 固着
- ・ 壊死組織の増加
- ・ 疼痛

**3. その他の注意**

- (1) 本品をカットしないこと。
- (2) 創腔へ使用しないこと。
- (3) 本品は滅菌済みで、包装に破損等がない限り無菌性は保証されるが、使用前に包装が破損又は汚損している場合には使用しないこと。
- (4) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- (5) 本品を再滅菌しないこと。

**\*\* 【保管方法及び有効期間等】**水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。使用期限は包装に記載（自己認証による）。**\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社  
電話：03-6914-5004