

Åpningsguide for Biogel® hanskeforpakning

'Holdeteknikk'

Det er ulike teknikker for åpning av hanskepakke. Teknikken varierer av flere grunner:

- utformingen av hanskepakken
- det forskjellige materialet i inner- og ytterforpakningen
- teknikken for å ta på hanskene (åpen metode, lukket metode med mansjett i hånden eller med synlig mansjett¹).
- forpakning med single eller doble hansker

Sikre ytterforpakningens kanter slik at de ikke rører noen del av innerforpakningen og at innerforpakningen ikke er nær forseglingen på ytterforpakningens innerkanter. Dette er for å sikre og opprettholde steriliteten til innerforpakningen.

Åpning av hanskeforpakningen (utført av en usteril sykepleier)



1. Inspiser og rist hanskepakken lett for å påse at innerpakken er plassert i midten av ytterpakken. Dette gjøres for å hindre at innerpakken faller ut på den forseglede kanten når ytterpakken åpnes.



2. Dra endene på kortsiden fra hverandre. Start med øvre hjørne lengst fra deg. Fortsett med andre øvre hjørne nærmest deg.



3. Ta et godt grep med begge hender på hver side av forpakningen slik at langsiden av pakken kan dras fra hverandre.



4. Press begge hendene sammen så de to innerhanskene blir tvunget fra hverandre.



5. Ved bruk av åpen teknikk, ta tak i den fargede innerhansken i forpakningen på øvre kortside. Pass på at den koordinerende operasjonssykepleier vender den riktige siden av mot mottaker.



6. Når du tar tak i første hansken, sørg for at fingrene ikke kontaminerer den andre hanskepakken som forblir i forpakningen når du kler på innerhanskene. Den koordinerende operasjonssykepleier vil i mellomtiden sikre steriliteten til de gjenværende innerhanskene.



7. Endre håndens posisjon til nedre kortside av innerforpakningen og legg innerhanskepakken på et rent og tørt område. Påse at forpakningens nedre ende stikker ut ca 5 cm. fra bordet slik at du får tak i innerpakken og kan pakke ut uten å kontaminere de desinfiserte hendene.



8. Åpne pakken med innerhanskene. Vær nøye med at desinfiserte hender ikke kontamineres. Ta på de fargede innerhanskene.



9. Ta pakken med ytterhanskene fra den koordinerende operasjonssykepleieren og ta ut ytterhanskene.



10. Ta på hanskene som anbefalt¹.

Referanse: 1 Folin A. Donning indicator double Gloving system. Safe Hands 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf 22 70 63 70. info.no@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Biogel navn og logo er registrerte varemerker globalt til Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0621905


Mölnlycke®