

Påkledningsveiledning for operasjonsfrakker

Ta med den sterile frakken inn i et område hvor frakken kan åpnes uten risiko for kontaminasjon.



1. Før armene inn i ermehullene. Hold frakken unna kroppen, og la den folde seg helt ut.



2. Før armene inn i ermene gjennom ermehullene. Hold hendene i skulderhøyde og unna kroppen.



3a. Alt. 1 Ved åpen metode med sterile hansker, trekkes mansjetten over hånden til den er på nivå med tommelen.

3b. Alt. 2 Ved lukket metode skyver du inn hendene til kanten av mansjetten.



4. Koordinerende operasjonssykepleier trekker frakken over skuldrene, og berører kun innsiden av frakken.



5. Fest borrelåsen.



6. Knyt frakkens innerbelte.



7. Etter at hansker er tatt på, gripes belteholderen med begge hender. Skill venstre, ytre belte fra belteholderen og hold beltet i venstre hånd.



8. Gi belteholderen til koordinerende operasjonssykepleier. Snu deg 3/4 omdreining mot venstre mens koordinerende operasjonssykepleier trekker det ytre beltet helt ut.



9. Frigjør det ytre beltet ved å trekke det ut av belteholderen, som holdes av koordinerende operasjonssykepleier, og knytt belteenden sammen med enden på det ytre beltet på

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Brynsalleen 4, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Mölnlycke navn og logo er globalt registrerte varemerker som tilhører Mölnlycke Health Care AB NOSU0681905


Mölnlycke®