

Veiledning for bandasjeskift

Din behandler har valgt Mextra® Superabsorbent til såret ditt.

Slik legger du på Mextra® Superabsorbent:

1. Vask hendene med såpe og varmt vann i 20 sekunder.
2. Rens såret slik din behandler har vist deg.
3. Legg Mextra Superabsorbent direkte på sårområdet med den hvite siden av bandasjen mot såret. Den blå siden skal vende opp!



4. Sårputen skal overlape den tørre omkringliggende huden.
5. Fiksér Mextra Superabsorbent med en egnet bandasje eller tape.



Når skal bandasjen skiftes:

Din behandler anbefaler at du skifter bandasjen (fylles ut av helsepersonell):

Kontakt helsepersonell hvis du trenger hjelp eller veiledning.

Har du tilgang til internett kan du se videoen som viser hvordan du legger på bandasjen. Følg lenken eller skann koden med mobilen og finn video for Mextra Superabsorbent



www.molnlycke.no/applisering-bandasjer

Viktig å huske på:

- ✓ Du må ikke klippe i Mextra Superabsorbent
- ✓ Mextra Superabsorbent er kun til engangsbruk og skal ikke brukes flere ganger.

Mextra Superabsorbent skal håndteres og legges på av helsepersonell. Dersom helsepersonell ikke er tilgjengelig, kan du eller en omsorgsperson måtte foreta bandasjeskiftet. Mölnlycke Health Care tar ikke noe ansvar når appliseringen av bandasjen foretas av slike personer. Hvis Mextra Superabsorbent legges på av en person som ikke er helsepersonell, så skjer dette helt og holdent på brukernes egen risiko.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Brynslåleén 4, 0667 Oslo. Tlf. 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke og Mextra er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Med enerett. NOWC1682007