


# Mepore®

## Selvheftende absorberende bandasje

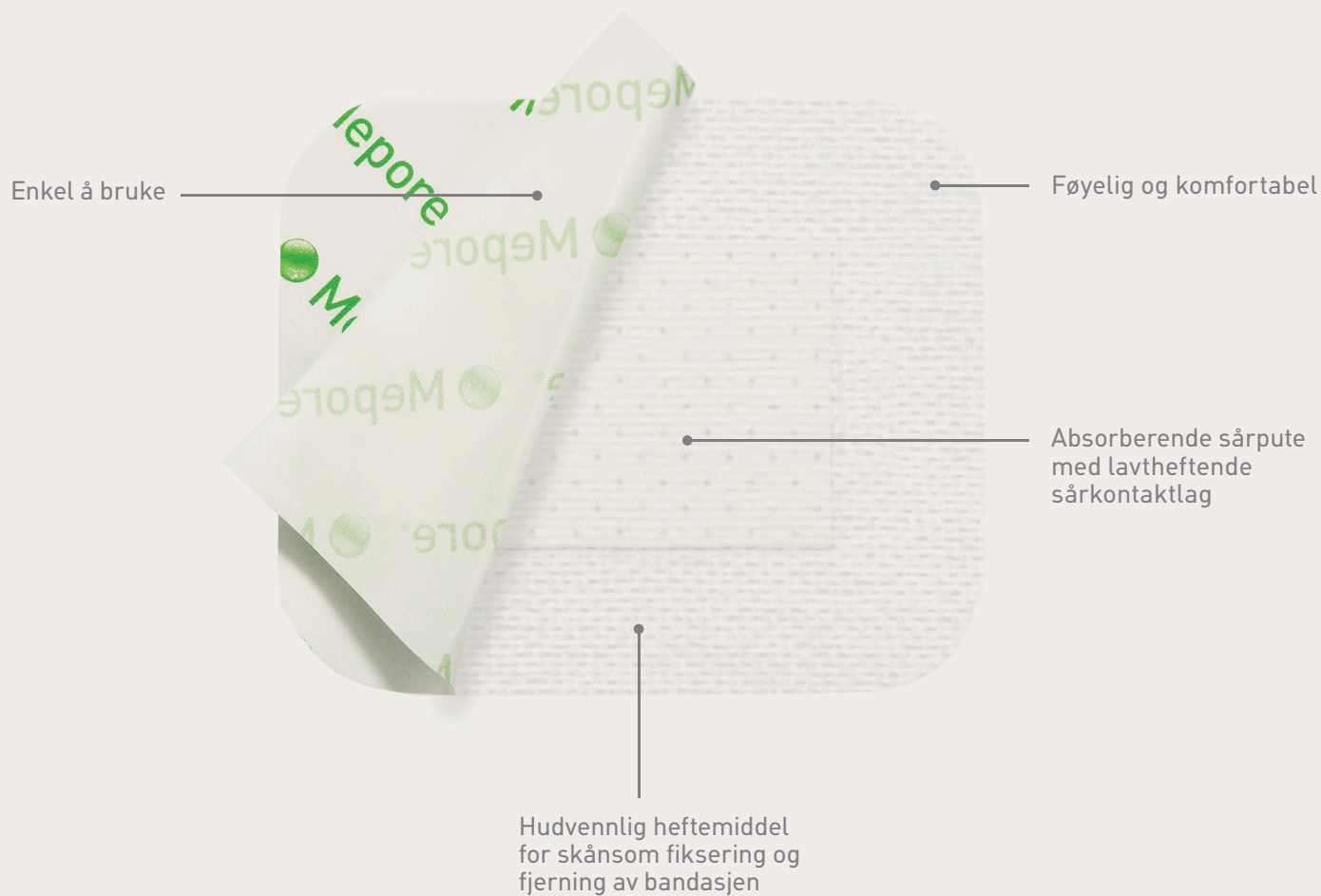

Mepore® er en pustende, selvheftende bandasje for lite til moderat væskende sår. Den er hudvennlig og skånsom mot huden ved fiksering og fjerning.

## Hvordan bruke Mepore®



1. Ta tak i beskyttelsespapiret ved overlappingen. Dra de litt fra hverandre.



2. Appliser bandasjen på huden uten å strekke den, og fjern resten av beskyttelsespapiret.



3. Stryk over bandasjen for å sikre god heft. Ikke strekk bandasjen ved applisering.

## Slik fungerer Mepore

Mepore® er en pustende, selvheftende bandasje som absorberer blod og sårveske. Den vannavvisende baksidefilmen dekker og beskytter såret mot ytre forurensning. Mepore har et hudvennlig heftemiddel som gir skånsom fiksering. Enkel å bruke - føyelig og komfortabel for brukeren.

## Fordeler med Mepore

- Hudvennlig heftemiddel for skånsom fiksering og fjerning av bandasjen
- Lavheftende sårkontaktlag
- Absorberer blod og sårveske
- Føyelig og komfortabel
- Vannavvisende overflate gir beskyttelse mot ytre kontaminasjon

## Bruksområder

Mepore kan brukes på lite til moderat væskende sår, som for eksempel postoperative sår, kutt og skrubbsår.

## Mepore er pakket i sterile enhetspakninger

Art. nr	Størrelse i cm	Sårpute i cm	Antall i eske	Antall i kartong
672000	5 x 7	4 x 2	60	480
670800	6 x 7	3 x 4	60	480
670860*	6 x 7	3 x 4	5	70
672100	8 x 10	3,5 x 6	50	400
670960*	9 x 10	4,5 x 6	5	100
672200	8 x 15	3,5 x 10	50	400
671066*	9 x 15	4,5 x 10	5	70
671100	9 x 20	4,5 x 15	30	180
671170	9 x 20	4,5 x 15	5	70
671200	9 x 25	4,5 x 20	30	210
671300	9 x 30	4,5 x 25	30	270
671400	9 x 35	4,5 x 30	30	180

\* Kan henges på pigg

Mepore leveres også i usterile 2- og 5-meters ruller i dispenserer.

Art. nr.	Bredde i cm	Sårpute i cm	Antall i kartong
2-meters ruller			
331980	4	1,5	30
332080	7	3	21
5-meters ruller			
331900	4	1,5	24
332000	7	3	18

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.  
The Mölnlycke and Mepore trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0792212

  
**Mölnlycke®**