

Tubifast® 2-Way Stretch®


Tubulær bandasje som gir brukeren full bevegelsesfrihet

- 2-Way Stretch® teknologien gjør at bandasjen enkelt former seg etter forskjellige kroppsdeler
- Kombinasjonen av bredde- og lengdeelastisitet gir brukeren full bevegelsesfrihet¹
- Ingen behov for strips eller tape
- Enkel å bruke: kan klippes til ønsket lengde
- Inneholder ikke naturgummilateks
- Kan vaskes og gjenbrukes
- Tilgjengelig i fem fargekodede størrelser for å passe alt fra små til store kroppsdeler




Tubifast® 2-Way Stretch® tubulære bandasjer er utviklet for fiksering av bandasjer uten bruk av strips eller tape, og til fuktig og tørr tildekking. Tubifast kan også benyttes til besyttelse av huden på ulike steder av kroppen og til behandling av Epidermolysis Bullosa².


Hvordan bruke Tubifast® 2-Way Stretch®

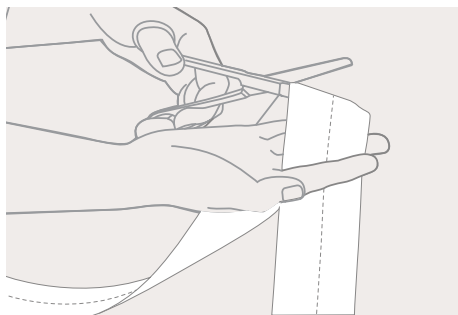

1. Velg riktig bredde på bandasjen ut fra fargekoden, og klipp til passende lengde.

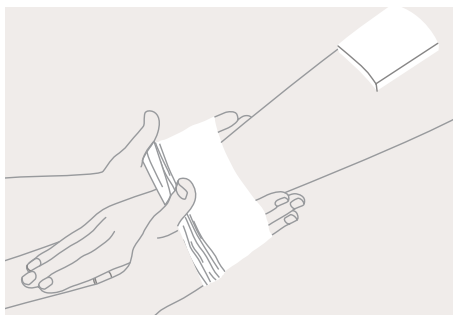

2. Strekk Tubifast® 2-Way Stretch® over ønsket område.

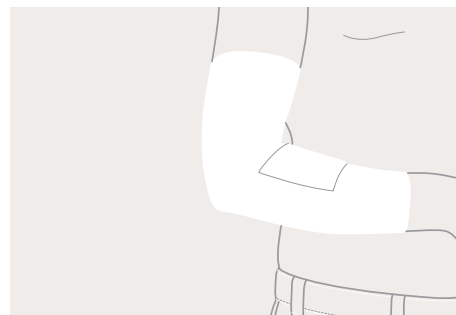

3. Plassér Tubifast 2-Way Stretch slik at den dekker bandasjen. Illustrerte trinn-for-trinn instruksjoner er tilgjengelig for mer avansert applisering.

Slik fungerer Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast® 2-Way Stretch® trenger ingen strips eller tape for å sitte, og dens tubulære konstruksjon lar luft sirkulere over huden. Kombinasjon av bredde- og lengdeelastisitet gir brukeren full bevegelsesfrihet.

Fordeler med Tubifast 2-Way Stretch

- Former seg etter kroppens konturer
- Gir brukeren full bevegelsesfrihet
- Enkel å bruke; kan klippes til ønsket lengde
- Holder bandasjen sikkert på plass, uten bruk av strips eller tape
- Inneholder ikke naturgummilateks, er ikke sensibiliserende og fører ikke til hudirritasjon
- Kan vaskes og gjenbrukes
- Tilgjengelig i fem fargekodete størrelser, utviklet for å passe alt fra små til store kroppsdel

Bruksområder

Tubifast 2-Way Stretch tubulære bandasjer er utviklet for fiksering av bandasjer uten bruk av strips eller tape. Den er spesielt godt egnet til fiksering på vanskelige områder, som for eksempel amputasjonsstumper.

Produktet er også utviklet for fuktig og tørr tildekking ("wrapping") og til bruk under gips. Tubifast kan også benyttes til besyttelse av huden på ulike steder av kroppen og til behandling av Epidermolysis Bullosa.²

Materialinnhold

Viskose, elastan og polyamid

Referanser: 1. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a two-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. *Journal des plaies et cicatrisations* 2013;18(88):38-44. 2. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.
The Mölnlycke, Tubifast and TwoWay Stretch trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0682105

Tubifast 2-Way Stretch sortiment

Produkt	Art. nr	Bredde og lengde	Omkrets
RØD	2480	3,5 cm x 1 m	9-18 cm
Små kroppsdel	2434	3,5 cm x 10 m	9-18 cm
GRØNN	2481	5 cm x 1 m	14-24 cm
Små og mellomstore kroppsdel	2436	5 cm x 10 m	14-24 cm
BLÅ	2482	7,5 cm x 1 m	24-40 cm
Store kroppsdel	2438	7,5 cm x 10 m	24-40 cm
GUL	2483	10,75 cm x 1 m	35-64 cm
Ekstra store kroppsdel, hoder og barnekropper	2440	10,75 cm x 10 m	35-64 cm
LILLA	2479	20 cm x 1 m	64-130 cm
Overkropp (voksen)	2444	20 cm x 10 m	64-130 cm

Tubifast 2-Way Stretch er pakket i enhetspakninger

Vaskeanvisning

