



## **BARRIER**<sup>®</sup> laparotomielaken

- **100% ondoordringbaar** voor optimale veiligheid van de patiënt
- **Optimaal gevouwen**, eenvoudig aan te brengen door één persoon
- **Comfortlaag** waar nodig voor het welzijn van de patiënt
- **Doeltreffende absorptie** houdt het werkveld droog

# Instructies



1. Positioneer het afdeklaken in het midden van de borst van de patiënt (zie pictogram).



2. Verwijder het release papier en plaats het laken op de patiënt.



3. Vouw het laken open naar de zijkanten, eerst naar u toe en vervolgens naar de andere kant.



4. Vouw het laken volledig open naar de voeten van de patiënt.



5. Vouw de bovenkant van het laken open over de anesthesieboog.



6. De patiënt is volledig afgedekt. Gebruik de haken en lussen om slangen en kabels te bevestigen.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
61330	<b>Laparotomielaken</b> 200/270x315cm, incisiefolie 23x36cm, versterking 50x100cm, 2 geïntegreerde slangenhouders	10/20

Dit afdeklaken is ook beschikbaar voor ProcedurePak® trays.

Find out more at [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, B-2600 Berchem - Tel. 0032 (0)3 286 89 50, Fax. 0032 (0)3 286 89 52  
Mölnlycke Health Care BV - Postbus 3196, NL-4800 DD Breda - Tel. 0031 (0)76 521 96 63, Fax. 0031 (0)76 522 17 82  
[www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

De naam en het logo van Mölnlycke Health Care alsook het handelsmerk BARRIER® en ProcedurePak® zijn geregistreerde merken van de Mölnlycke Health Care groep. Copyright (2012)

  
**Mölnlycke®**