

Halsset BARRIER®

- Effectieve absorptie om een droog werkgebied te garanderen
- Geïntegreerde slangenhouders
- Splitlaken met grote afmetingen om patiënt en tafel volledig af te dekken



BARRIER creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Onze innovatieve en procedure-specifieke oplossingen worden aangevuld met voordelen op het gebied van levering en logistiek, permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.

Instructies



Plaats het splittaken (lichaam), met label 1, in het midden van de borstkas van de patiënt. Let op de richting van het pictogram.



Vouw het laken open naar jezelf toe, weg van jou en over het laagste gedeelte van het lichaam. Verwijder het release papier.



Bevestig de zelfklevende randen aan de hals van de patiënt.



Plaats het splittaken (hoofd), met label 2, op het hoofd van de patiënt. Let op de richting van het pictogram.



Vouw het laken open naar jezelf toe, weg van jou en over het hoofd van de patiënt.



Verwijder het release papier.



Bevestig de zelfklevende randen.



De patiënt is volledig afgedekt.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
697250	Halsset 1 mayo overzettafelsloop 79x145 cm, 65x85 cm absorberend 4 handdoekjes 18x25 cm 2 OP-tapes 9x49 cm 1 splittaken (lichaam) 175x230 cm, zelfklevende split 20x20 cm 1 splittaken (hoofd) 260x150 cm, zelfklevende split 20x65 cm 1 instrumentenveld 150x190 cm, 75x190 cm absorberend	7/14

Alle vermelde componenten zijn ook beschikbaar voor ProcedurePak® trays.

BARRIER afdek materiaal

- 100% ondoordringbaar voor optimale veiligheid van de patiënt
- Optimaal gevouwen voor een steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door 1 persoon
- Gebruiksvriendelijk verpakt met dispenserdoos en peel-open eenheidsverpakking