

Op maat gemaakte laparoscopieoplossingen



## BARRIER® laparoscopielaken met beenhoezen

- All-in-one model met geïntegreerde elementen
  - eenvoudig en efficiënt af te dekken door één persoon
  - tijdbesparend
  - bevordert het aseptisch handelen
- BARRIER® Flex plakstroken voor een betrouwbare barrière bij insufflatie van de buik
- Geïntegreerde zakken en slangenhouders om ordelijk te werken
- Met de geïntegreerde plakstrook kan de lengte van de beenhoezen worden aangepast
- 100% ondoordringbare materialen om de veiligheid van de patiënt te garanderen

# Instructies



1. Houd rekening met de richting van het pictogram op het laparoscopielaiken. Verwijder het releasepapier.



2. Plaats het afdeklaken gecentreerd op de patiënt. Vouw het open, eerst naar u toe en dan van u af.



3. Druk zachtjes om de BARRIER® Flex plakstroken aan te drukken.



4. Houd rekening met het pictogram op het voeteind. Neem de hoek van de beenhoes vast en vouw ze open over het been. Doe hetzelfde voor het andere been.



5. Gebruik de geïntegreerde plakstrook om de lengte van de beenhoes aan te passen en om het afdeklaken te bevestigen.



6. Vouw het laken volledig open in de richting van het hoofd van de patiënt.



7. U bent klaar met afdekken.

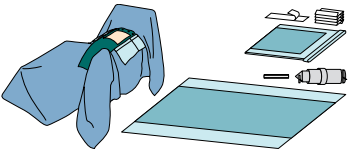
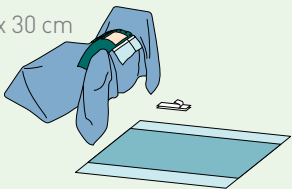


8. Gebruik de geïntegreerde zakken en slangenhouders om de werkruimte efficiënt in te richten.

Scan de QR-code voor meer informatie over Mölnlycke of om een instructievideo te bekijken.



Ref.	Componenten ProcedurePak
944205	Laparoscopielaiken 250/175/270 x 260 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm

Ref.	Steriele codes	Verpakking
694245	1 Mayo Overzettafelloop 79x145 cm, 65 x 85 cm absorberend 4 Handdoekjes 18 x 25 cm 1 OP-tape 9 x 49 cm 1 Slangenhouders, klittenband 2,5 x 30 cm 1 Camerahoes 14 x 250 cm, afscheurbare tip 1 Laparoscopielaiken 250/175/270 x 260 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm 1 Instrumentenveld 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorberend	 5/10
84511411	2 OP-tape 9 x 49 cm 1 Laparoscopielaiken 250/175/270 x 260 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm 1 Instrumentenveld 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorberend	 5/10

Alle vermelde componenten kunnen ook opgenomen worden in ProcedurePak® trays.

Meer informatie op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL-4800 DD Breda. Tel: +31 (0)76-521 96 63. Fax: +31 (0)76-522 17 82.  
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72, bus 2, B-2600 Berchem. Tel: +32 (0)3-286 89 50. Fax: +32 (0)3-286 89 52.  
 De naam en het logo van Mölnlycke Health Care, ProcedurePak® en BARRIER® zijn geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. Copyright 2016 [NLSU00401601]

