



BARRIER® Laparoscopi elaken

- All-in-one model met geïntegreerde elementen
 - eenvoudig en efficiënt af te dekken door één persoon
 - tijdbesparend
 - bevordert het aseptisch handelen
- BARRIER® Flex plakstroken voor een betrouwbare barrière bij insufflatie van de buik
- Geïntegreerde zakken en slangenhouders om ordelijk te werken
- Met de geïntegreerde plakstrook kan de lengte van de beenhoezen worden aangepast
- 100% ondoordringbare materialen om de veiligheid van de patiënt te garanderen

Instructies



1. Houd rekening met de richting van het pictogram op het laparoscopielen. Verwijder het releasepapier.



2. Plaats het afdeklaken gecentreerd op de patiënt. Vouw het open, eerst naar u toe en dan van u af.



3. Druk zachtjes om de BARRIER® Flex plakranden aan te drukken.



4. Vouw het laken volledig open in de richting van de benen van de patiënt.



5. Vouw het laken volledig open in de richting van het hoofd van de patiënt.



6. U bent klaar met het afdekken.

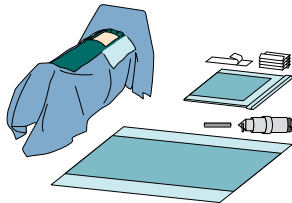


7. Gebruik de geïntegreerde zakken en slanghouders om de werkruimte efficiënt in te richten.

Scan de QR-code voor meer informatie over Mölnlycke Health Care of om een instructievideo te bekijken.



Ref.	Componenten ProcedurePak
954225	Laparoscopielen 175/250 x 360 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm

Ref.	Steriele codes	Verpakking
694265	1 Mayo Overzettafelsloop 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorberend 4 Handdoekjes 18 x 25 cm 1 OP-tape 9 x 49 cm 1 Slanghouder, klittenband 2,5 x 30 cm 1 Camerahoos 14 x 250 cm, afscheurbare tip 1 Laparoscopielen 175/250 x 360 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm 1 Instrumentenveld 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorberend	5/10 

Alle vermelde componenten kunnen ook opgenomen worden in ProcedurePak® trays.

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
 De Mölnlycke Health Care naam en logo en BARRIER® en ProcedurePak® merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. © 2016 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden [NLSU00381601]

