

BARRIER® Heupplaken met dislocatiezakken



- Drisite® Plus* biedt een uitstekende absorptie en vochtafvoer
- Versterkte materialen in de kritieke zone zorgen voor een betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand
- Driedimensionaal model om een groot gebied te beschermen voor anesthesie
- Geïntegreerde slangenhouders om het instrumenteren te vergemakkelijken
- Optimale vouwwijze voor een steriele afdekking
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid

* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke en absorberende barrière.


Afdekinstructie



1. Ontvouw het instrumentenveld en leg deze onder het been van de patiënt.



2. Alternatief 1: leg een zelfklevende doek met kleebrand richting het hoofd en verwijder de plakstrip. Leg een tweede zelfklevende doek over de eerste doek met de kleebrand van de patiënt af.

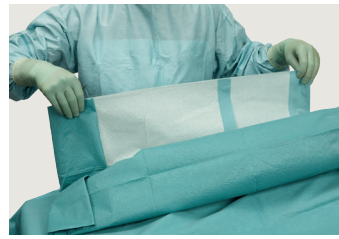

3. Vouw één kant rond het been. Vouw de tweede doek over de voet en zet de kleebrand vast op het been.



4. Zet de doeken rond de voet en langs het been vast met een OP-tape.



2. Alternatief 2: bedek het been met een stockinette en zet vast met OP-tape.



5. Steek het been door de opening. Een plakstrip onder het afdek materiaal zorgt voor extra veiligheid.



6. Trek het heuplaken richting het hoofd van de patiënt en zet de elastische opening vast in de juiste positie.



7. Plaats het heuplaken over de anesthesieboog.

Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60602	Heupset met dislocatiezakken 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 2 zelfklevende afdekdoek 75x75cm 1 stockinette 32x120cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 heuplaken met dislocatiezakken 230/300x330cm, opening 18x22cm elastisch 1 versterkt instrumentenveld, 150x190cm, 75x190cm absorberend	3/6
60601	Heuplaken met dislocatiezakken 230/300x330cm, opening 18x22cm elastisch, opgevouwen	4/8

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.

Ref. nr.	Component Mölnlycke® procedure trays
70601	Heuplaken met dislocatiezakken 230/300x330cm, opening 18x22cm elastisch

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00861709)

