

BARRIER® heupset met Drisite® Plus

- Versterkte materialen in de kritieke zone zorgen voor een betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand
- Drisite® Plus* biedt een uitstekende absorptie en vochtafvoer
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid
- Optimale vouwwijze voor een steriele afdekking en drapeerbaarheid door één persoon

* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke en absorberende barrière.

Instructies




1. Vouw eerst de tafelsloop open en leg hem onder het been van de patiënt.



2. Dek het been af met de stockinette. Vouw de absorberende comfortlaag van de stockinette naar binnen om overdracht van micro-organismen te voorkomen. Bevestig ze met de OP-tape.



3. Leg het splitlaken onder het been van de patiënt.

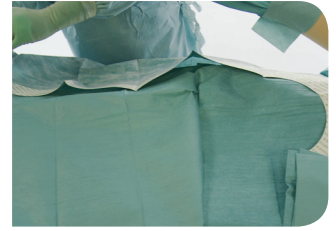

4. Vouw eerst de zijkanten van het laken open en ga dan verder naar de voeten. Verwijder de beschermfolie.



5. Breng de split aan rond en onder de geslachtsorganen en langs het lichaam. Bevestig de andere zijde langs de heup en de zijde van de patiënt.



6. Verwijder de middelste beschermfolie van het anesthesielaken. Plaats uw hand in de vouw van het laken en leg het op de patiënt.



7. Vouw het laken gedeeltelijk open en verwijder de 2e en 3e beschermfolie. Vouw het laken verder open, eerst naar u toe en vervolgens van u weg.



8. Vouw volledig open naar het hoofd van de patiënt. U bent klaar met het draperen.

Scan de QR code voor meer informatie over Mölnlycke of om de instructievideo te bekijken.



Ref.-nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60604	Heupset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 beschermingsveld 75x90cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 afdeklaken 90x150cm 3 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken 200x260cm, split 20x102cm 1 zelfklevend afdeklaken 300x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
60606	Heupset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 splitlaken (plastic) 150x193cm, split 15x61cm 1 stockinette 32x120cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken 200x260cm, split 7x102cm 1 zelfklevend afdeklaken 240x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8

Ref.-nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60608	Heupset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 beschermingsveld 75x90cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 stockinette 32x120cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken 200x260cm, split 20x102cm 1 zelfklevend afdeklaken 300x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
60609	Heupset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 beschermingsveld 75x90cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 stockinette 32x120cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken 200x260cm, split 7x102cm 1 zelfklevend afdeklaken 300x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
60611	Heupset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 beschermingsveld 75x90cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 stockinette 32x120cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken 230x330cm, split 20x102cm 1 zelfklevend afdeklaken 300x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
60613	Heupset 4 cellulose doeken 18x25cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken 200x260cm, split 20x102cm 1 zelfklevend afdeklaken 300x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	5/10
60615	Heupset 2 cellulose doeken 18x25cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 instrumentenveld 100x150cm, 75x150cm absorberend 1 splitlaken (plastic) 150x193cm, split 15x61cm 1 splitlaken 230x330cm, split 20x102cm 1 slangenhouder 5x15cm 1 OP-tape 9x49cm 1 zelfklevend afdeklaken 300x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 inpakveld 100x100cm	4/8
60616	Heupset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 afdekdoek 75x90cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 stockinette 32x120cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken 250x290cm, split 20x102cm 1 zelfklevend afdeklaken 300x175cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8

Ref.-nr.	Tray componenten
70503	Splitlaken 200x260 cm, zelfklevende split 7x102 cm, patch 70x100 cm
70504	Splitlaken 200x260 cm, zelfklevende split 20x102 cm, patch 70x100 cm
70511	Splitlaken 230x330 cm, zelfklevende split 20x102 cm, patch 70x160 cm
70513	Splitlaken 250x290 cm, zelfklevende split 20x102 cm, patch 70x160 cm

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.

De Mölnlycke®, Drisite® Plus en BARRIER® merknamen, namen en logo's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. [NLSU00871702]

