



Mölnlycke®

BARRIER® nephroscopielaken

- Geïntegreerde vochttopvangzak voor efficiënte vloeistofcontrole
- Geïntegreerde rekbare kleefstrook voor een optimale hechting op de huid
- Ultrasterk materiaal in kritieke zones voor een efficiënt en veilig gebruik van instrumenten



BARRIER creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Onze innovatieve en procedure-specifieke oplossingen worden aangevuld met voordelen op het gebied van levering en logistiek, permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.

Instructies



1 Houd het laken met het instructielabel in de juiste richting. Verwijder het release papier.



2 Plaats het laken ter hoogte van de nier.



3 Vouw het laken eerst naar jezelf toe open, dan naar de andere kant...



4 ...en vervolgens over het onderlichaam.



5 Vouw het laken open in de richting van het hoofd, over de anesthesieboog.



6 Vouw de opvangzak open.

| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakking |
|---------------|--|------------|
| 65810 | Nephroscopielaken 175x300 cm met opvangzak, opening incisie 5 cm, ingepakt | 7/14 |

Dit laken is ook beschikbaar voor ProcedurePak® trays.

BARRIER afdek materiaal

- 100% ondoordringbaar voor optimale veiligheid van de patiënt
- Optimaal gevouwen voor een steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door 1 persoon