


# Mepiform®

## Zelfklevend zacht siliconen littekenverband


- zelfklevend, zonder extra fixatie
- discreet en dun
- comfortabel in het dagelijkse leven
- slechts 1 verband per week




## Gebruiksaanwijzing

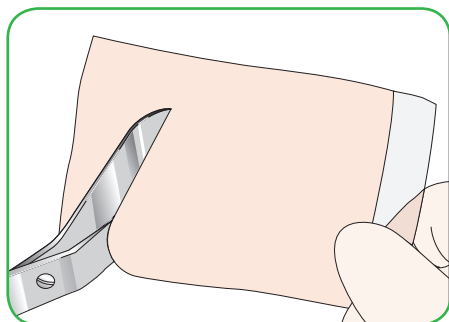

Verwijder het schutblad. Indien nodig, knip in de juiste vorm. Verknip alvorens het schutblad te verwijderen.

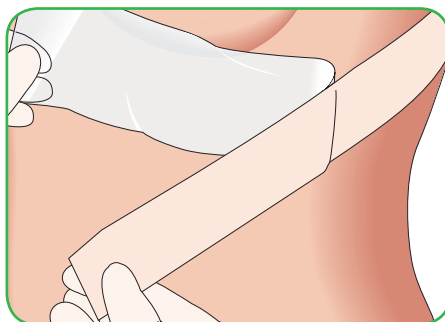

De huid goed drogen voor het aanbrengen van Mepiform®.

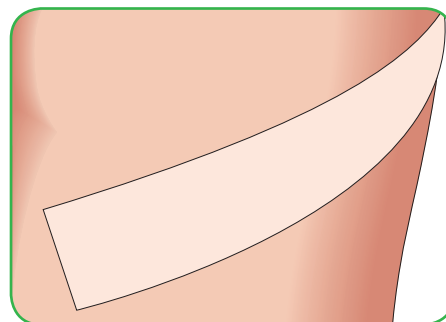

Eenmaal per dag verwijderen om de huid te wassen. Na het baden of douchen enkele minuten wachten alvorens het terug aan te brengen.

## Hoe werkt Mepiform®?

Men heeft empirisch vastgesteld dat de lokale toepassing van siliconen een positieve impact heeft op hypertrofische littekens en keloïden<sup>(1)</sup>. De aanblik van een oud litteken verbeteren kan 3 maanden tot een jaar duren, afhankelijk van de toestand van het litteken. Mepiform® moet 24/24 uur gedragen worden. Het is aanbevolen Mepiform® eenmaal daags te verwijderen, bijvoorbeeld voor het nemen van een douche of een bad, voor inspectie en het reinigen van de huid. In preventie zal Mepiform® 2 tot 6 maanden aangebracht worden, afhankelijk van de toestand van het litteken.

## Voordelen van Mepiform®

- Zelfklevend, geen extra fixatie
- Dun, flexibel en discreet
- Kan gedurende dagelijkse activiteiten gedragen worden
- Kan verwijderd en teruggeplaatst worden
- Kostenbesparend: éénzelfde Mepiform® kan gemiddeld gedurende 7 dagen aangebracht worden

### Referenties:

1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994), J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.
2. AS/NZS 4399:1996.

## Toepassingen

- Oude of nieuwe hypertrofische littekens en keloïden
- Gesloten wonden in preventie van hypertrofische en keloïde littekens

## Voorzorgsmaatregelen

Bij maceratie, rash, jeuk of irritatie dient de behandeling tijdelijk stopgezet te worden. Zodra de symptomen verdwenen zijn, Mepiform® weer toepassen. Gradueel de toepassingsduur per dag opvoeren.

Mepiform® heeft een UV protectie factor equivalent aan 7.7<sup>(2)</sup>.



## Assortiment Mepiform® (steriel)

Afmeting	Cnk-code/verp.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
5 x 7,5 cm	1457-274	293200	5 x 1 stuk	30 stuks
10 x 18 cm	1457-282	293400	5 x 1 stuk	25 stuks
4 x 30 cm	1457-266	293100	5 x 1 stuk	25 stuks

Mölnlycke Health Care NV  
Berchemstadionstraat 72 bus 2 • 2600 Berchem (Antwerpen)  
Tel: +32(0)3 286 89 50 • Fax: +32(0)3 286 89 52  
www.molnlycke.com • www.safetac.com

De naam en het logo van Mölnlycke Health Care alsook Mepiform® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van Mölnlycke Health Care.

**Mölnlycke®**