

Tubifast™

WITH
2-WAY STRETCH™
TECHNOLOGY

Het gebruiksvriendelijk buisverband

- Ideaal voor verbandfixatie en huidbescherming voor elk lichaamsdeel
- Tubifast™ 2-Way stretch houdt verbanden goed op zijn plaats zonder tapes, spelden of windsels
- Kan ook gebruikt worden als onderkous
- Verschillende afmetingen beschikbaar
- Kan op maat geknipt worden en kan uitgerekt worden over het verband voor een egale pasvorm
- Handwas mogelijk
- Kostefficiënt

Tubifast™ 2-Way stretch houdt verbanden op hun plaats, zonder vernauwing of compressie

De lichte elasticiteit geeft patiënten een complete bewegingsvrijheid

Beschikbaar in een waaier van goed aangeduide referenties met kleurcodering per afmeting

Goede pasvorm voor zowel smalle ledematen tot een volwassen borstkasformaat

Buisverband zonder noodzaak aan spelden en tape



Gebruiksaanwijzing

1. Kies het verband met de juiste breedte. Maak gebruik van de kleurencodering op de referenties. Snijd de juiste lengte af.
2. Stretch Tubifast™ 2-Way stretch over het betreffende gebied.
3. Plaats Tubifast™ 2-Way stretch over het verband.



Hoe werkt Tubifast™?

Tubifast™ 2-Way stretch is gemaakt uit viscose met zeer fijne elastische draden verweven in het materiaal om zo lichte elasticiteit te creëren. Tubifast™ 2-Way stretch houdt verbanden goed op zijn plaats zonder vernauwing of compressie. Spelden en tapes zijn hier niet nodig. Zijn lichte elasticiteit geeft patiënten een complete bewegingsvrijheid. Tubifast™ 2-Way stretch is beschikbaar in 6 afmetingen, ontworpen om op elk lichaamsdeel te gebruiken.

Elke afmeting is aangeduid met een gekleurde lijn verweven in het verband. Het verband is snel en gemakkelijk te gebruiken: knip op maat en rek het verband uit voor een egale, niet benauwende pasvorm.

Voordelen van Tubifast™ 2-Way stretch

- Houdt verbanden veilig op hun plaats zonder belemmering of compressie
- Biedt patiënten een volledige bewegingsvrijheid
- Buisverband – geen spelden of tapes nodig
- Handwas mogelijk
- Snel en gemakkelijk in gebruik: knip op gewenste maat en rek over het verband voor een egale, niet benauwende pasvorm
- Beschikbaar in een reeks referenties met kleurencodering, geschikt voor zowel kleine ledematen tot een volwassen borstkasformaat
- Kostefficiënt

Tubifast™ 2-Way stretch is beschikbaar in stukverpakking

Product	Art. nr.	CNK-code/stuk	Breedte x Lengte
GAMMA ROOD	2480	2380-285	3.5cm x 1m
Small (ledematen)	2434	0628-180	3.5cm x 10m
GAMMA GROEN	2481	2380-293	5cm x 1m
Small en Medium (ledematen)	2436	0628-198	5cm x 10m
GAMMA BLAUW	2482	2380-301	7.5cm x 1m
Large (ledematen)	2438	0628-206	7.5cm x 10m
GAMMA GEEL	2483	2380-319	10.75cm x 1m
Extra-large (Ledematen, Hoofd, Borstkas kinderen)	2440	0628-214	10.75cm x 10m
GAMMA BEIGE	2484	2380-327	17.5cm x 1m
Borstkas volwassenen	2442	0628-222	17.5cm x 10m
GAMMA PURPER	2479	2380-277	25cm x 1m
Large (Borstkas volwassenen)	2444	2380-269	25cm x 10m

Toepassingen

Tubifast™ 2-Way stretch kan gebruikt worden als verbandfixatie en bescherming op elk lichaamsdeel. Het kan ook gebruikt worden als onderkous.

Als buisverband is Tubifast™ bijzonder geschikt om verbanden op hun plaats te houden op moeilijk te verbinden lichaamsdelen, amputaties en/of stompen etc...

Inhoud van de vezel

Viscose, elastane en polyamide

Wasinstructies

