



## BARRIER® Hybride Cardiovasculair afdeklaken

- **Tijdsbesparing:** Een all-in-one afdeklaken bespaart duidelijk tijd in vergelijking met het afdekken met meerdere afdeklakens<sup>1</sup>. Het all-in one afdeklaken kan door één persoon aangebracht worden.
- **Volledig afdekken:** Een extra lang afdeklaken van 4,5 m lang en 2,4 m breed dekt de volledige tafel af.
- **Aangepast aan de interventie:** Incisiefolie gepositioneerd voor zowel minimaal invasieve ingrepen, femorale-percutane ingrepen als open chirurgie
- **Sterk en absorberend:** Een versterkte patch over de volledige lengte van het afdeklaken
- **Visuele controle:** De transparante zijpanelen laten visuele controle toe van het bedieningspaneel en de C-boog zonder de steriliteit in gevaar te brengen.
- **Gemakkelijk:** De instrumenten kunnen gemakkelijk in de zijzakken aan beide zijanten van het laken geplaatst worden. Deze zakken zijn ook geschikt om vocht op te vangen.

# Instructies

Deze instructies zijn bedoeld voor trainingsdoeleinden. Om de integriteit van de demonstratiepersoon te bewaren, draagt deze ondergoed, wat niet volgens de richtlijnen van 'patiëntvoorbereiding' is.



1. Plaats eerst de afdeklakens aan de zijkant om het incisiegebied te definiëren.



2. Duw de extra middenplooi naar beneden en verwijder het release papier. Plaats het afdeklaken op het midden van de borst.



3. De bovenzijde van de incisiefolie moet minstens even hoog of hoger geplaatst worden dan de incisura jugularis. Druk daarna de incisiefolie aan.




4. Ontvouw de zijkanten.



5. Verwijder het release papier en controleer of het afdeklaken centraal op de patiënt geplaatst is.



6. Vouw het afdeklaken over de liezen en druk de incisiefolie op de liezen aan. Ontvouw eerst de onderste plooi tot over de knieën.

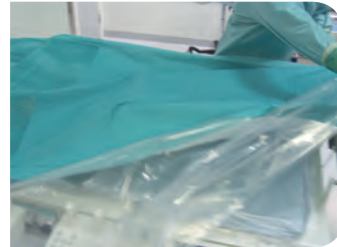

7. Vouw vervolgens het afdeklaken verder open in de richting van de voeten.



8. Vouw het afdeklaken open in de richting van het hoofd. Er zijn tapes aangebracht om het afdeklaken gemakkelijk en veilig te fixeren over de anesthesieboog.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
61800	<b>Hybride Cardiovasculaire Set</b> 1 Hybride Cardiovasculair Afdeklaken 240/300x450 cm, incisiefolie 60x40 cm en 15x27 cm (2) 2 Zelfklevende afdeklakens 75x75 cm 1 Instrumentenveld 150x190 cm, 75x190 cm absorberend	5/10

Alle componenten van deze set zijn ook beschikbaar voor ProcedurePak® trays.

For further information about Mölnlycke Health Care and this product scan the QR code below.

## BARRIER afdek materiaal

- 100% ondoordringbaar voor een optimale veiligheid van de patiënt
- Optimaal gevouwen voor steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door één persoon



Referenties: 1. Data on file.

Find out more at [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, B-2600 Berchem - Tel. 0032 (0)3 286 89 50, Fax. 0032 (0)3 286 89 52  
Mölnlycke Health Care BV - Postbus 3196, NL-4800 DD Breda - Tel. 0031 (0)76 521 96 63, Fax. 0031 (0)76 522 17 82  
[www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

De naam en het logo van Mölnlycke Health Care alsook het handelsmerk BARRIER® en ProcedurePak® zijn geregistreerde merken van Mölnlycke Health Care.

  
**Mölnlycke®**