




BARRIER® Knie arthroscopielaken

- Geïntegreerde vochtvangzak voor een doeltreffende vochtafvoer
- Optimale vouwwijze voor aseptische afdekking en drapeerbaarheid door één persoon
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid
- Ook geschikt voor gebruik op een gekantelde tafel

Instructies



1. Vouw eerst de tafelsloop open en leg hem onder het been van de patiënt.

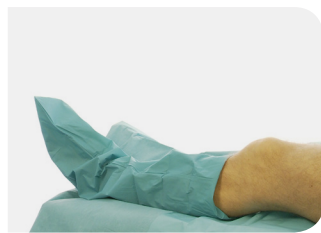

2. Dek het been af met de stockinette. Vouw de absorberende comfortlaag van de stockinette naar binnen om overdracht van micro-organismen te voorkomen.



3. Maak vast met de OP-tape.



4. Houd rekening met de richting van het pictogram. Leg het opgevouwen arthroscopielaken over de voet van de patiënt. Steek de hand door de elastische opening, neem de voet van de patiënt vast en trek hem door het laken.



5. Vouw het onderste deel van het laken open onder het been van de patiënt en breng de twee elastische openingen aan rond de knie.



6. Vouw het bovenste deel van het laken helemaal open naar het hoofd. Gebruik de zelfklevende patches om de foliezak te bevestigen.



7. Breng het been in de correcte positie voor de operatie. U bent klaar met het draperen. Het laken kan ook gebruikt worden met een gekantelde tafel.

Scan de QR code voor meer informatie over Mölnlycke of om de instructievideo te bekijken.



Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60101	Knie arthroscopierset 1 knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	5/10
60102	Knie arthroscopierset 1 mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 stockinette 22x75cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
60104	Knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch	5/10
60105	Knie arthroscopielaken 260/300x320cm, opening 7 en 5cm elastisch, ingepakt	5/10

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® trays.

Ref. nr.	Tray componenten
70104	Knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch
70105	Knie arthroscopielaken 260/300x320cm, opening 7 en 5cm elastisch

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.
De Mölnlycke®, Drisite® Plus en BARRIER® merknamen, namen en logo's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00881702)

