



# Mölnlycke®

## BARRIER® T.U.R. set

- Geïntegreerde vochttopvangzak voor efficiënte vloeistofcontrole
- Geïntegreerde sterke zeef zodat weefselmonsters gemakkelijk en veilig verzameld kunnen worden
- Geïntegreerde latexvrije condoom voor een rectaal touché
- Suprapubische opening met zelfklevende randen
- Beschermd metalen versterkingen in de hoeken ondersteunen de opvangzak wanneer deze zich ontplooit en zijn tevens veilig te gebruiken
- Beschikbaar in twee afmetingen om te voldoen aan verschillende behoeften



### **BARRIER creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg**

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Onze innovatieve en procedure-specifieke oplossingen worden aangevuld met voordelen op het gebied van levering en logistiek, permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.

## Instructies



1 Plaats het laken met het instructielabel in de juiste richting.



2 Open het laken tussen de benen van de patiënt. Let op de pijlen (pictogram).



3 Vouw het laken open.



4 Dek één been af.



5 Doe vervolgens hetzelfde aan het andere been.



6 Vouw het laken open over de benen en vervolgens in de richting van het hoofd van de patiënt, over de anesthesieboog.



7 De patiënt is volledig afgedekt.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
888222	<b>T.U.R. set</b> 1 Handdoekje 1 Slanghouder 9x18 cm 1 T.U.R. laken 175/270x180 cm met opvangzak, openingen 8 cm en 5 cm, condoom voor rectaal touché 1 Instrumentenveld 150x190 cm, 75x190 cm absorberend	6/12
888224	<b>T.U.R. set</b> 1 Handdoekje 1 Slanghouder 9x18 cm 1 T.U.R. laken 175/270x180 cm met opvangzak/afvoerslang, openingen 8 cm en 5 cm, condoom voor rectaal touché 1 Instrumentenveld 150x190 cm, 75x190 cm absorberend	7/14
888225	<b>T.U.R. set</b> 1 Handdoekje 1 Slanghouder 9x18 cm 1 T.U.R. laken 175/270x180 cm met zeef, openingen 8 cm en 5 cm, condoom voor rectaal touché 1 Instrumentenveld 150x190 cm, 75x190 cm absorberend	7/14
888226	<b>T.U.R. set</b> 1 Handdoekje 1 Slanghouder 9x18 cm 1 T.U.R. laken 175/270x240 cm met opvangzak, openingen 8 cm en 5 cm 1 Instrumentenveld 150x190 cm, 75x190 cm absorberend	6/12

Alle vermelde componenten zijn ook beschikbaar voor ProcedurePak® trays.

## BARRIER afdekmateriaal

- 100% ondoordringbaar voor optimale veiligheid van de patiënt
- Optimaal gevouwen voor een steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door 1 persoon
- Gebruiksvriendelijke verpakking met dispenserdoos en een peel-open eenheidsverpakking